

Hoe het masker op zetten?

1; Na het rechtmaken van de neus clip,

Houd de clip naar boven en de buitenste kleur (blauw, grijs, zwart, roze) naar buiten.

2; Plaats eerst de onderkant op de kin en hang de oorlusjes achter de oren met

beide handen. Pas vervolgens met beide handen aan tot het masker goed aanvoelt.

3; Druk met 2 vingers van beide handen op de clip om deze op je neus te passen.

4; Met beide handen voelen als het masker goed zit en goed past op het aangezicht.

