

1. Wkładka korytkowa



2. Wkładka supinująca łuk podłużny i tyłostopie



3. Wkładka supinująca tyłostopie



4. Podpiętki (1cm i 2cm)

5. Ostrogi piętowe

aurelka®

Producent:

P.P.H. "EL-BUT" S.C.

06-500 Mława

ul. Instalatorów 2

Tel./Fax +48 (23) 655-13-86

mobile: +48 509-455-856


e-mail: info@aurelka.pl

www.aurelka.pl


1. Supinacje i pronacje

Osadzenie pięty, inaczej supinacja piętowa oraz osadzenie pięty i wsparcie łuku podłużnego, czyli supinacja łuku podłużnego. Stosowana często przy stopach płasko-koślawych, koślawości kolan oraz stępu. Korekcja w środku buta lub w podeszwie (w zależności od wysokości podwyższenia):

- **Supinacja łuku podłużnego** - podparcie pod łukiem podłużnym na 1/3 szerokości i długości buta. Wysokość podwyższenia według zalecenia.
- **Supinacja tyłostopia** - podniesienie wewnętrznej części podeszwy na 1/3 szerokości i długości buta, pod piętą. Wysokość podniesienia według zalecenia. Jeśli jest w środku buta ma wygląd podkowy. Dzięki temu pięta umiejscowiona jest w korytku i nie jest spychana do zewnętrznej krawędzi buta.

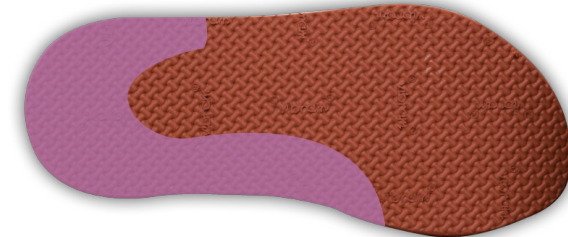

- **Pronacja tyłostopia** - podniesienie wewnętrznej części podeszwy na 1/3 szerokości i długości buta, pod piętą. Wysokość podniesienia według zalecenia. Jeśli jest w środku buta ma wygląd podkowy. Dzięki temu pięta umiejscowiona jest w korytku i nie jest spychana do zewnętrznej krawędzi buta.
- **Klin od strony wewnętrznej** - supinacja (w środku buta lub w podeszwie) stosowany często przy koślawości kolan. Wysokość podwyższenia według zalecenia.

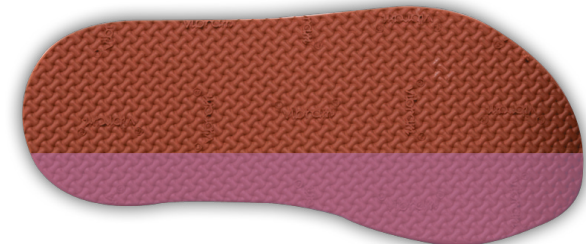


- **Klin od strony zewnętrznej** - pronacja. Stosowana często przy wadzie szpotawości pięt i kolan. Wysokość podwyższenia według zalecenia.

2. Obcasa Thomasa


- **Standardowy** obcas Thomasa
- **Supinacja** obcasa Thomasa (podwyższenie według zalecenia)
- **Pronacja** odwróconego obcasa Thomasa (podwyższenie według zalecenia)
- **Odwrócony** obcas Thomasa



3. Pelota stosowana często przy płaskostopiu poprzecznym (korekcja w środku buta)

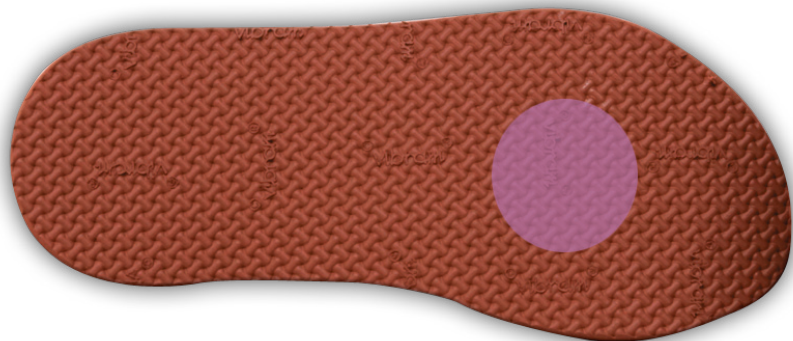

4. Obcasy i podeszwy

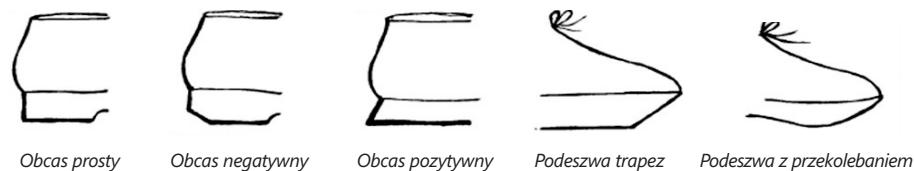

5. Antywarus - forma prosta (symetryczna) i odwiedzeniowa (antywarus) - stosowane w przypadku stopy końsko-szpotaowej, stopy przywiedzionej oraz przy chodzie „gołębim”. Korekcja charakteryzuje się przedłużeniem zakładki od strony przysiódkowej, do głowy pierwszej kości śródstopia, od strony zewnętrznej w zależności od potrzeby. Cholewka ma kształt prosty nie „nerkowaty” przy obuwiu otwartym zmniejszony jest otwór przy palcach.

6. Usztywnienie gorsetowe - stosowane często przy wiotkości mięśni stopy, wiotkości stawów oraz przy porażeniu mózgowym. Korekcja ta polega na bardzo wysokim i mocnym usztywnieniu buta. Usztywnienie może być zrobione na dwa sposoby - usztywnienie piętowe i usztywnienie przednie

7. Korekcja przy skrótach kończyn - korekcja wykonywana w środku buta (do 0,5 cm) lub w podeszwie. Możliwe wykonanie przekolebania.

8. Różne rozmiary butów np.: lewy 25, prawy 26

9. Możliwość zwężenia i poszerzenia obuwia

10. Inne korekcje (konsultowane z producentem tel. 509-455-856)

*WSZELKIE KOREKCJE W OBUWIU MARKI AURELKA,
WYKONYWANE SĄ WYŁĄCZNIE WEDŁUG ZALECENIA LEKARZA*

