

Agnieszka

Jak prawidłowo zaaplikować dziecku sól fizjologiczną do noska przed odciąganiem wydzieliny, by nie spływała do gardła.

Proszę dać jedynie 2-3 krople do każdej z dziurek, ważne także aby dziecko odpowiednio ułożyć, nie przechylać głowy dziecka do tyłu a jedynie lekko odchylić.

Magdalena

Panie Bartoszu, czy aspirator można podłączyć do bezprzewodowego odkurzacza typu dyson? czy jest potrzebna dodatkowa przełączka? czy są dostępne takie "przełączki" w zestawie ?

To zależy – jeśli po ściągnięciu szczotki odkurzacza ma rurę ssącą o średnicy 3 cm to Katarek powinien pasować w innym przypadku może być problem. Na ten moment nie mamy w ofercie przełączek.

Dominika

Jak najlepiej czyścić Aspirator do odkurzacza?

Pod bieżącą wodą, korzystając ze szczoteczki dołączonej do zestawu. Przy większych zabrudzeniach można użyć mydła lub innego delikatnego detergentu

Anna

Ile razy na dzień można używać katarka do odciągania z noska wydzieliny?

W zależności od potrzeby, jeśli katar jest duży i gęsty to na tyle często aby dziecko miało drożny nosek. Jeśli stosujemy Katarek w celach pielęgnacyjnych wystarczy raz dziennie.

Marta

Czy należy codziennie używać katarka, czy tylko w trakcie choroby??\

W trakcie choroby jest to niezbędne urządzenie, natomiast podczas codziennej pielęgnacji także można z niego skorzystać jeśli chcemy oczyścić dziecku nos – nie jest to jednak konieczność.