

Bartosz

Na jakiej mocy odciągać katerek?

Katarek działa z odkurzaczem o mocy 800-1800W.

Natalia

Czy inhalator powinien zawierać tylko maseczkę? Część inhalatorów zawiera również inne końcówki jakie to ma znaczenie?

Dla małych dzieci rekomendowane są maseczki. W części inhalatorów są ustniki – są one dla dzieci starszych i osób dorosłych.

Agnieszka

Czy przed odciąganiem kataru lepiej nawilżyć noskę solą fizjologiczną czy wodą morską?

Solą fizjologiczną

Agnieszka

Czy katarek jest przeznaczony tylko dla 1 dziecka?

Katarek może być używany przez więcej niż 1 dziecko. Końcówkę należy jednak wyczyścić i wówczas dopiero użyć u drugiego dziecka. W większości naszych modeli są dwie końcówki więc przy dwójce dzieci każde może mieć swoją.

Ewelina

Czy dla dwójki dzieci trzeba zakupić dwa produktu? Ile końcówek jest wymiennych?

Poza Katarkiem Simple wszystkie pozostałe modele Katarka mają dwie końcówki – dla dwójki dzieci. Dodatkowo zawsze można dokupić samą końcówkę – np. w naszym sklepie internetowym.

Agnieszka

Czy aspiratory do odkurzacza są lepsze od tych na siłę wdechu rodziców?

Aspiratory do odkurzacza radzą sobie z każdym rodzajem kataru, także tym gęstym, głęboko zalegającym. Aspiratory ustne to dobra opcja do pielęgnacji czy usuwania lekkich, wodnistych katarów.

Anna

Czy dziecko nie wystraszy się odkurzacza?

Może tak się zdarzyć☺ wszystko zależy od dziecka. Są dzieci które wręcz przeciwnie zasypiają przy dźwięku odkurzacza. Jeśli jednak dziecko boi się odkurzacza warto nie rezygnować z zabiegu i oswajać dziecko z urządzeniem.

Izabela

Czy katarek jest całkowicie bezpieczny?

Jeśli jest używany zgodnie z instrukcją i zaleceniem jest bezpieczny. Jego działanie jest wzorowane na ssakach laryngologicznych które używane są na oddziałach szpitalnych.

Monika

Czy trzeba mieć zalecenie od lekarza żeby używać katarka?

Nie. Aspirator jest wyrobem medycznym, nie trzeba mieć recepty na niego. Istotą produktu jest wsparcie leczenia kataru poprzez usunięcie wydzieliny z nosa. Dziecko do 1 roku życia oddycha wyłącznie przez nos stąd niezmiernie istotne jest usunięcie wydzieliny z nosa.

Nicola

Czy mogą go używać też dorośli?

Katarek jest dedykowany przede wszystkim niemowlętom – dzieci do 1 roku życia oddychają wyłącznie przez nos a nie mają odruchu smarkania więc trzeba im pomóc pozbyć się kataru. W przypadku dorosłych wszystko zależy od jednostki chorobowej – warto zapytać lekarza czy nie widzi przeciwwskazań.

Agnieszka

Czy można zakraplać nosek przed i po odciąganiu solą fizjologiczną z jednej ampułki?

Tak jak najbardziej.

Bartosz

Ile razy dziennie można odciągać katarek?

Tyle ile potrzeba – w zależności od rodzaju kataru. Nosek musi być drożny. Należy jednak pamiętać aby używać soli fizjologicznej przed i po zabiegu a aspiratora używać zgodnie z instrukcją.

Zosia

Czy maluszek tygodniowy potrzebuje czyszczenie noska codziennie?

Jeśli nie ma kataru to nie ma potrzeby czyścić nosek mu codziennie.

Agnieszka

Czy do nebulizatora wykorzystuje się inną sól fizjologiczną niż do zakraplania?

Taką samą.

Agnieszka

Jak często można wykonywać u dzieci nebulizacje?

Tyle ile potrzeba. Należy pamiętać aby wykonywać ją 1-2 h po posiłku i 1h przed posiłkiem.

Ewelina

Czy nebulizator jest na akumulatory czy baterie? jak długo wytrzyma bateria?

Na akumulator ładowany kablem USB.

Zosia

Gdzie możemy mierzyć temperaturę tym termometrem?

Termometr mierzy temperaturę ciała – na skroni i za uchem, może także zmierzyć temperaturę pokarmu w butelce, wody do kąpieli czy otoczenia.

Natalia

Czy taki terminator jest dokładny?

tak

Zosia

Czym różnią się nebulizacje od inhalacji?

Nebulizacja to rodzaj inhalacji. Nebulizacja to sposób podawania leku/soli fizjologicznej za pomocą mgiełki.

Natalia

Czy po odciągnięciu warto też nawilżyć nosek?

tak

Agnieszka

Do jakiej mocy zredukowana jest siła ssąca przy Katarku?

Do bezpiecznej dla dziecka od 1 dnia życia ☺ Moc Katarka to 200 mBar – dla porównania ssak laryngologiczny ma zakres mocy 200-400 mBar

Natalia

Czy odsysamy raz jedną dziurkę raz drugą i kończymy czy można wracać znowu do tej pierwszej dziurki, aby mieć pewność że wszystko wyszło? ☺

Można wrócić do drugiej dziurki, aby sprawdzić czy wyszło wszystko. Ważne aby przed i po aspiracji użyć soli fizjologicznej.