

Marlena

przy infekcji ile razy dziennie można odciągać katar z noska za pomocą katarku do odkurzacza ?

Tyle ile potrzeba, należy jednak pamiętać aby przed i po aspiracji zakropić nosk solą fizjologiczną.

Bartosz

ile razy dziennie można odciągać wydzielinę z noska katarkiem do odkurzacza?

Tyle ile potrzeba, należy jednak pamiętać aby przed i po aspiracji zakropić nosk solą fizjologiczną.

Kamil

czy Katarek jest bezpieczny od pierwszych dni życia dziecka?

Tak, może być używany od pierwszego dnia życia.

Tomek

katarek od ktorego miesiąca można już używać ?

od pierwszego dnia życia

Anna

Jak często nawilżać nosk solą fizjologiczną?

Przed każdą aspiracją i po aspiracji. Dodatkowo kiedy dziecko narażone jest na przebywanie w suchym pomieszczeniu (z ogrzewaniem czy klimatyzacją).

Andrzej

Jak pielęgnować nosk katarkiem? prawidłowo?

Najpierw należy rozrzedzić wydzielinę solą fizjologiczną. W tym celu wpuszczamy do każdej z dziurek 2-3 krople i chwilę czekamy aż krople rozrzedzą wydzielinę. Następnie używając Katarka odciągamy wydzielinę, przykładając do każdej z dziurek (nie wkładamy do noska). Po aspiracji znowu używamy sol fizjologiczną zakraplając każdą z dziurek w celu nawilżenia.

Magdalena

Czasami by nie tracić czasu na odkurzacz odciągam katar katarkiem przez usta czy wtedy też powinnam za krople nos woda morską?

Tak, niezależnie od aspiratora należy zawsze zakropić nosk solą fizjologiczną.

Bartosz

jak prawidłowo czyścić katarek?

Pod bieżącą wodą, przy większych zabrudzeniach można użyć delikatnego detergentu np. mydła. W Katarkach (poza Katarkiem Simple) dołączona jest mała szczoteczka którą można wyczyścić końcówki oraz komorę aspiratora. Jeśli zabrudzeniu ulegnie rurka polecamy dokupić czyścik

<https://katarek.pl/produkt/czyscik/>

Magdalena

Czy da się przedawkować użycie katarku? Czy może uszkodzić zatoki?

Katarek używamy w przypadku infekcji, wówczas odciągamy wydzielinę tyle ile potrzeba. Przy codziennej higienizacji wystarczy użyć Katarka rano i wieczorem oraz kiedy pojawią się w nosku jakieś kózki czy paproszki. Należy pamiętać aby zawsze przed i po aspiracji używać soli fizjologicznej.

Katarek używamy zgodnie z instrukcją – czyli przykładamy do noska a nie wkładamy końcówek do dziurek w nosku. Przy prawidłowym używaniu jest bezpieczny dla zatok 😊

Kamil

czy katarak ma w swojej ofercie inhalatory?

Prezentowany nebulizator to produkt powstały we współpracy marek Helpmedi oraz Katarek. Można go nabyć na stronie www.helpmedi.com.pl

Magda

Od kiedy można katarku używać u dziecka?

Od pierwszego dnia życia

Bartosz

jaka moc musi mieć odkurzacz żeby prawidłowościągnąć wydzielinę?

800-1800W

Dagmara

świetny jest ten nebulizator 😊 czy można go używać tylko z solą fizjologiczną, czy także z jakimiś lekami ?

Można używać z solą fizjologiczną oraz lekami przeznaczonymi do nebulizacji. NebuCare działa z większością leków – wyjątkiem są preparaty oleiste, które mogą zakleić membrane.

Aleksandra

czy odkurzacz nie jest za głośny?

Zależy od odkurzacza 😊 są dzieci które wręcz zasypiają przy dźwięku odkurzacza czy suszarki. Są również takie które boją się nawet najcichszego odkurzacza. Wówczas warto mimo wszystko wykonać zabieg Katarkiem – trwa on kilka sekund a nos jest drożny. Mamy wiele pomysłów jak przekonać dziecko do takiego zabiegu 😊

Kamil

czy katarak pasuje do wszystkich odkurzaczy?

Katarek pasuje do odkurzaczy domowych standardowych z rurą o przekroju okrągłym. Jeśli odkurzacz posiada rurę o przekroju innym niż okrągły polecamy dokupić adapter

<https://katarek.pl/produkt/adapter/>

W przypadku odkurzaczy pionowych bywa różnie. Jeśli jest rura ssąca o średnicy 3,3 cm to powinien pasować. W innych przypadkach może być problem.