

Lucyna

Czy katarerek pasuje do każdego odkurzacza?

Katarerek pasuje do tradycyjnych odkurzaczy domowych z rurą ssącą o przekroju okrągłym. Jeśli odkurzaczy posiada przekrój rury inny niż okrągły można dokupić adapter który jest elastyczny i dopasowuje się do kształtu rury. Natomiast w przypadku odkurzaczy pionowych jest to różnie – i raczej zalecamy sprawdzać indywidualnie.

<https://katarerek.pl/produkt/adapter/>

Natalia

Dzień dobry, mamy katarerek do odkurzacza - gdy tylko jest podłączony do rury, robi się duża afera - głośny sprzęt, głośne dziecko... mają Państwo jakieś patenty jak sobie z tym poradzić?

Na to niestety patentu nie mamy☺ ale z tego co wiemy to rodzice są pomysłowi i z pewnością na forach są sposoby w jaki sobie radzą np. zakrywają odkurzaczy kocem. Dziecko z kolei warto przyzwyczajać do zabiegu poprzez zabawę – odciąganie kataru misiowi czy pokazanie na swojej ręce jakie to niegroźne.

Renata

Co lepsze woda morska czy sól fizjologiczna? czy jest jakaś różnica ?

Sól fizjologiczna ma stężenie 0,9% NaCl natomiast woda morska ma stężenie wyższe. Woda morska będzie więc obkurczać naczynka krwionośne a tym samym niwelować produkcję wydzieliny. Sól fizjologiczna z kolei będzie nawilżać. Dodatkowo z racji tego że ma stężenie obojętne dla ludzkiego organizmu może być stosowana u niemowląt od 1 dnia życia.

Magdalena

Czy może pan opowiedzieć coś o skuteczności aspiratorów elektrycznych?

Aspiratory elektryczne radzą sobie z lekkim wodnistym katarą oraz w codziennej pielęgnacji noska. Nie radzą sobie natomiast z gęstym katarą. W takich wypadkach jedynie aspirator do odkurzacza sobie radzi.

Mama Marysi i Jasia

Od kiedy katarerek i czy można mieć 1 a używać więcej osób oczywiście członkowie rodziny

Katarerek można używać u dzieci od 1 dnia życia. Tak można używać jednego Kataręka u więcej osób. W zestawie są dwie końcówki, które można używać np. każdą końcówkę u

jednego dziecka, a przy większej ilości dzieci wystarczy umyć końcówkę pod wodą i używać u kolejnego dziecka. Takie końcówki można także dokupić i mieć dla każdego członka rodziny osobno.

<https://katarek.pl/produkt/koncowka-a/>

Ewelina

Od kiedy można stosować katarek podłączany do odkurzacza?

[Od 1 dnia życia dziecka](#)

Natalia

Czym lepiej nawilżyć śluzówkę przed użyciem katarka?

[Solą fizjologiczną 0,9% NaCl](#)

Renata

Czy do inhalatora można używać olejki ?

[Do nebulizatora siateczkowego nie można używać substancji oleistych, gdyż mogą zakleić membranę.](#)

Natalia

Kiedy warto zainwestować w nebulizator?

[Nebulizator przyda się podczas infekcji więc warto go kupić po urodzeniu dziecka, bo niestety wcześniej czy później infekcja się pojawi.](#)

Natalia

Jak często można korzystać z katarka? np gdy dziecko w nocy ulewa i co dzień tak naprawdę by się musiało powalczyć z wydzieliną?

[W przypadku infekcji używamy Katarka tak często jak jest to potrzebne – nosek ma być drożny. Należy jednak pamiętać aby przed i po aspiracji używać soli fizjologicznej w celu rozrzedzenia wydzieliny oraz nawilżenia. Jeśli natomiast chodzi o codzienną pielęgnację czy ulewanie to należy robić to także w zależności potrzeby jednak nie przesadzać i także proszę pamiętać o soli fizjologicznej.](#)

Ewelina

Jak czyścić aspirator? czy trzeba dezynfekować czy wystarczy wodą?

Po użyciu aspiratora myjemy go pod bieżącą wodą, przy większych zabrudzeniach można użyć wody z mydłem lub innym detergentem. W zestawie Katarek (poza Katarkiem Simple) znajduje się szczoteczka którą myjemy komorę oraz końcówki.

Ewelina

Czy dziecko nie będzie się bało odkurzacza?

Różnie to bywa – są dzieci które boją się odkurzacza a są takie które wręcz zasypiają przy jego dźwięku.

Magdalena

Czy w przypadku dwojga dzieci, każde z nich powinno mieć własną końcówkę, czy mycie wystarczy? Czy można końcówkę wyparzać wrzątkiem?

Poza Katarkiem Simple każdy inny rodzaj Katarka posiada dwie końcówki więc każde dziecko może mieć swoją własną końcówkę. Nie ma jednak przeciwwskazań aby jedną końcówką odciągać katar dwojce dzieci należy jednak ją umyć po każdej aspiracji. Końcówki myjemy pod bieżącą wodą, można dodać także mydła. Nie wyparzamy.

Magdalena

Od jakiego wieku jest bezpiecznie używać odkurzacza?

Od 1 dnia życia

Renata

Jak czyścić taki nebulizator? Czy konieczna jest dezynfekcja?

Należy go pojemniczek na lek pod bieżącą wodą, nie jest konieczna dezynfekcja.

Magdalena

Czy nebulizacje z soli można też stosować w okresie bezobjawowym w profilaktyce infekcji?

Tak jak najbardziej, inhalacje z soli są zalecane jako działanie profilaktyczne w celu nawilżenia dróg oddechowych.

Małgorzata

Jakie stężenie soli najlepiej stosować?

0,9%NaCl

Katarzyna

Czy z zestawu Katarek Complete można korzystać także bez odkurzacza?

Nie – ten zestaw jest tylko do odkurzacza. W zestawie Katarek Travel jest ustnik który umożliwia odciąganie wydzieliny także ustnie.

Ewelina

Czy katek travel jest wersją 2w1? Czyli do odkurzacza i ustny?

Tak

Monika

Czy same końcówki można dokupić? Tak aby każde dziecko miało swoją ?

Tak jak najbardziej.

Dla aspiratorów Katek Complete, Travel oraz Plus będą to takie:

<https://katek.pl/produkt/koncowka-a/>

Natomiast dla Katek Standard oraz Simple takie:

<https://katek.pl/produkt/koncowka-a-do-aspiratora-katek-standard/>