

GEBRUIKSAANWIJZING: MICRO DAP

MICRO DAP / Diphoterine®-oplossing:

Spoelmiddel om spatten van chemische stoffen op de huid weg te spoelen.



Gebruiksomstandigheden:

De MICRO DAP-spuitbus bevat 100 ml Diphoterine®-oplossing. De Diphoterine®-oplossing verwijdert de chemische stof van het huidoppervlak, stopt de penetratie ervan en wanneer de huid vervolgens langdurig wordt gespoeld, verwijdert het de chemische stof volledig uit de weefsels. Het volume werd geoptimaliseerd voor een gebruik binnen 60 seconden.

MICRO DAP moet op de risicozones gericht worden voor een optimale werking.

De Diphoterine®-oplossing werkt minder doeltreffend op waterstoffluoride of derivaten ervan in een zuur milieu. Voor deze situaties is het aan te bevelen Hexafluorine® te gebruiken. Deze spoeloplossing is bedoeld voor spatten waterstoffluoride en fluoriden in een zuur milieu.

Gebruiksaanwijzing:



MICRO DAP moet worden ingezet als allereerste spoeloplossing. Hebt u echter geen Diphoterine®-oplossing binnen handbereik, wacht dan niet met spoelen. Gebruik eventueel gewoon water, ook al zal dit trager werken dan de Diphoterine®-oplossing en door het tijdsverlies ook de doeltreffendheid van de oplossing beperken.

Opgelet: De doeltreffendheid van MICRO DAP wordt verzekerd door de actieve werking van de Diphoterine®-oplossing op chemische stoffen.

Gebruik: Het is aan te bevelen om tijdens een ongeval de volledige spuitbus MICRO DAP op de betreffende zone te sprayen.

Gebruik bij vertraagde spoeling: Na 60 seconden en naargelang de chemische stof kan het huidletsel zich al gevormd hebben. Spoelen met Diphoterine®-oplossing op een reeds gevormd letsel zal de secundaire zorgverstrekking verbeteren. In dit geval raden wij aan om de initiële spoeling voort te zetten met een tweede spoeling met MICRO DAP met Diphoterine® gedurende een periode die 3 tot 5 keer zo lang is als de tijd dat de chemische stof contact heeft kunnen maken met de huid.

Voorzorgsmaatregelen:

1. **Wanneer tijdens het gebruik van MICRO DAP gevaar bestaat voor schokken, verbrijzeling of ernstige wrijvingen, dan is het aan te bevelen om de spuitbus in een verstevigde hoes te steken. Elk spoor van schokken op de MICRO DAPM kan ertoe leiden dat de spray niet langer werkt.**
2. MICRO DAP-spuitbussen moeten worden bewaard op een plaats waar ze gevrijwaard zijn van hoge temperaturen en zonlicht - Het is eveneens aan te bevelen om de spray niet bloot te stellen aan ijsvorming, want de waterachtige oplossing kan bevriezen, waardoor ze niet onmiddellijk bruikbaar is. De Diphoterine®-oplossing opnieuw ontdooien heeft echter geen effect op de doeltreffendheid van het medisch hulpmiddel. De ideale gebruikstemperatuur ligt tussen 15 en 35 °C.
3. MICRO DAP is bedoeld voor continue spoelingen: een gedeeltelijke of in tijd beperkte verstuviging kan de pijn weliswaar verzachten, maar voorkomt niet de vorming van huidletsels.
4. Gebruik het medisch hulpmiddel niet meer wanneer de gebruiksdatum die vermeld staat op de verpakking, is verstreken.
5. De MICRO DAP-spray moet worden vervangen zodra de vervaldatum op het etiket is verstreken.

Afvoeren van de MICRO DAP-sprays:

De Diphoterine®-oplossing is een product waarvoor geen bijzondere maatregelen voor de afvalverwerking gelden. Toch raden wij aan om de regels voor de afvoer van spuitbussen te volgen voor dit product.

Bijwerkingen:

De Diphoterine®-oplossing in de MICRO DAP-spuitbus is een niet-irriterende en niet giftige oplossing die ook geen allergische reacties oproept.

PREVOR
Moulin de Verville
95760 VALMONDOIS
Frankrijk

Wetenschappelijke studies, testimonials, toxische gegevens, productlijsten en algemene aanbevelingen vindt u op onze website: www.prevor.com.