


## Kontrollera systemet, kontrollpanel

MagniLink S kontrolleras antingen via en kontrollpanel (inbyggd eller extern) alternativt via datorns tangentbord. Här beskrivs kontrollpanelens funktioner.

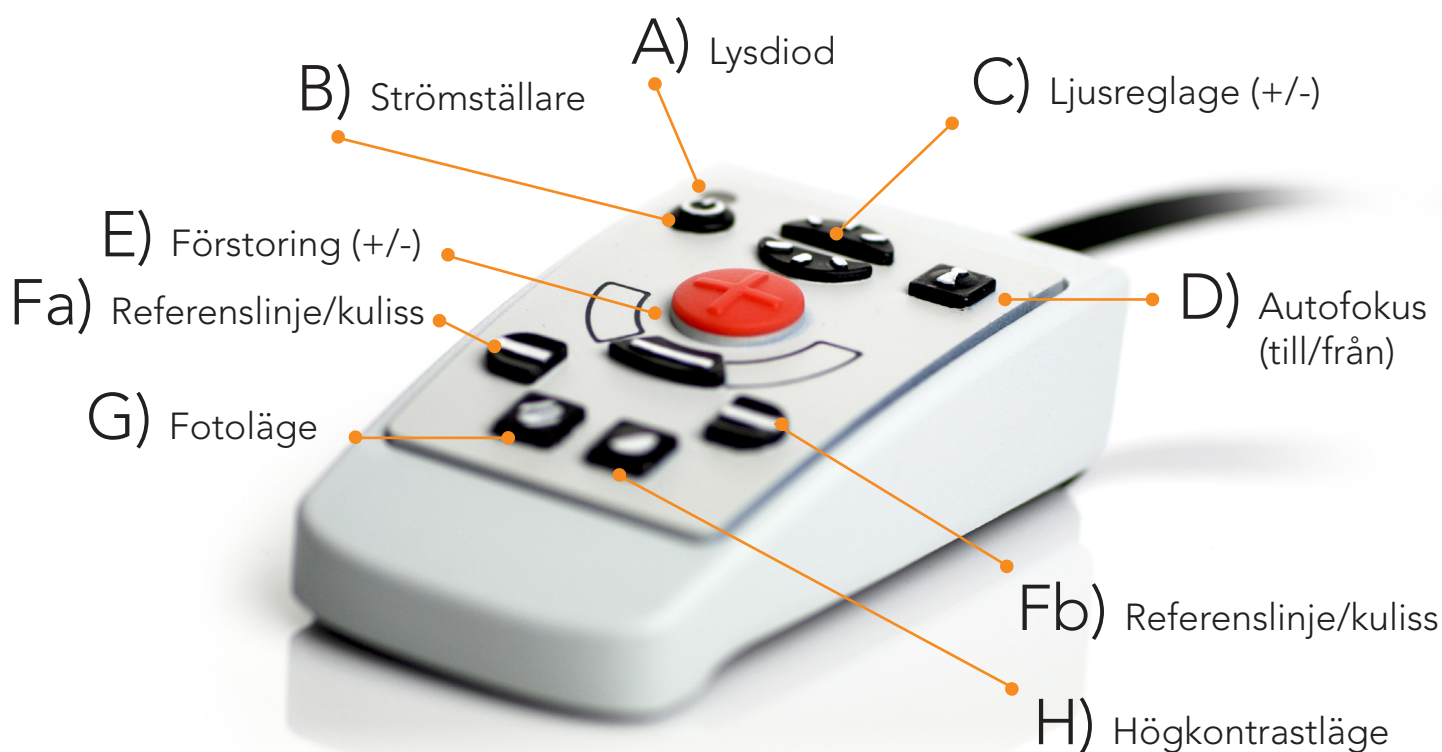

### A) Lysdiod

Fast grönt ljus: systemet är påslaget.  
 Blinkande grönt: uppstart. Blinkande gult: standby. Rött ljus: Något är fel.

### B) Strömställare

Tryck in för att starta/stänga av systemet

### C) Ljusreglage

Justerar ljusnivån. Övre halvan ökar ljusstyrkan, undre sänker ljusstyrkan.

### D) Autofokusering till/från

Tryck in för att växla mellan autofokus och fokuslås.

### E) Förstoringsreglage

Undre (-) knappen minskar förstoringen, medan den övre (+) ökar den.

### Fa) Referenslinje/Kuliss

Intryckning flyttar referenslinjen uppåt. Fortsatt intryckning växlar till vertikalt läge och flyttas åt vänster. Därefter en horisontell kuliss. Ytterligare nedtryckning gör att kulissen blir vertikal.

### Fb) Referenslinje/kuliss

Omvänd funktion jämfört med Fa).

### G) Fotoläge

<sup>1)</sup> Tryck för att växla mellan naturliga färger/gråskala. <sup>2)</sup> Håll ned, tillsammans med reglaget **C** för att tända/släcka lampan\*. <sup>3)</sup> Håll ned 3 sek. för att spegelvända bilden.

### H) Högkontrastläge m artificiella färger

Tryck för att växla mellan olika färgkombinationer, håll ned för att rotera bilden.

\*Övre knappen tänds lampan, den undre knappen släcker den.

# Snabbmanual

# MagniLink S

## Tangentbordskommandon

MagniLink S kontrolleras antingen via en kontrollpanel eller via datorns tangentbord. Här följer en lista över de fabriksinställda tangentbordskommandona.

F1	<b>Naturliga färger</b>	Ctrl + 0	<b>Översiktsläge</b> – tryck igen för att återställa förstoring
F2	<b>Positiv bild med förhöjd kontrast</b>	Ctrl + Pil vänster	<b>Referenslinje vänster/upp</b>
F3	<b>Negativ bild med förhöjd kontrast</b>	Ctrl + Pil upp	<b>Referenslinje vänster/upp</b>
F5	<b>Ta "snapshot"</b>	Ctrl +	<b>Referenslinje höger/ned</b>
Shift + F5	<b>Ta "snapshot" – snabbt!</b>	Pil höger	
Ctrl + F5	<b>Starta/avsluta videoinspelning</b>	Ctrl + Pil ned	<b>Referenslinje höger/ned</b>
Ctrl + Shift + F5	<b>Starta/avsluta videoinspelning – snabbt!</b>	Ctrl + A	<b>Avaktivera/aktivera "Alltid överst"</b>
F6	<b>Visningsläge "Snapshots"</b>	Ctrl + M	<b>Minimera applikationsfönstret</b>
Shift + F6	<b>Direktvisa senast gjord "Snapshot"</b>	Ctrl + R	<b>Rotera kamerabilden medurs</b>
Ctrl + F6	<b>Visningsläge video</b>	Shift + Ctrl + R	<b>Rotera kamerabilden moturs</b>
Shift + Ctrl + F6	<b>Direktvisa senast inspelad video</b>	Ctrl + I	<b>Spegla kamerabilden</b>
F8	<b>Förinställda bilddelningslägen</b>	F	<b>Frys kamerabilden</b>
F9	<b>Info- och inställningsfönstret</b>	Ctrl + J	<b>Lås autofokus</b>
Pil upp	<b>Zooma in</b>	Ctrl + Alt + S	<b>Globalt kortkommando (snabb aktivering av MLS)</b>
Pil ned	<b>Zooma ut</b>		
Pil höger	<b>Öka ljusstyrka</b>		
Pil vänster	<b>Minska ljusstyrka</b>		