


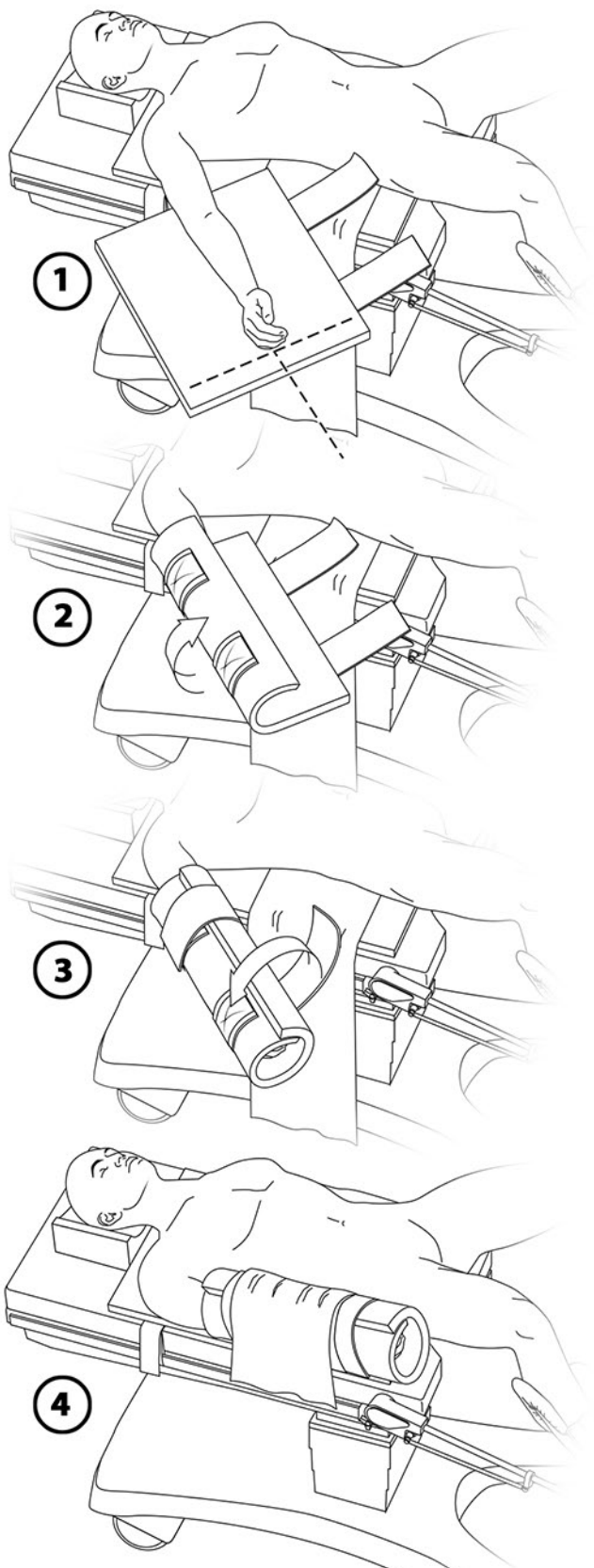

1. Placera One-Step Trendelenburg armskydd under patientens arm, justera placeringen lateralt med remmarna nedåt och mot patientens buk

Armskyddet skall placeras över armbågen och precis nedanför fingertopparna. Handen skall placeras i en naturlig anatomisk position med handflatan i riktning mot patienten, så att ulnarnerven inte kläms.

One-Step armskyddet skyddar armen, ulnarnerven och fingrarna när benstöden justeras och ger enkelt tillgång till fingrarna och intravenösa infarter. Minimerar även risken för cellnedbrytning.

2. Omslut den yttre delen av armskyddet runt armen
3. Omslut sedan den återstående delen av armskyddet runt armen, och fixera remmarna mot motsvarande kardborrband enligt bilden. Kontrollera att armstödet är ordentligt fastsatt runt patientens arm.

Kontrollera nu att armstödet är rätt positionerat i förhållande till armbågen, handleden och fingrarna. Kontrollera ev. pulsoximeter, intravenösa infarter och dylikt, att de inte är klämda och fungerar bra.

4. Upprepa steg 1-3 på den andra armen

När armstöden är på plats, fixera armstöden med draglakan enligt sjukhusets riktlinjer, mellan patienten och Pink Pad.

Fixeringsmetod kan variera från sjukhus till sjukhus. Draglakanet kan placeras under patienten eller under operationsbordets madrass. Draglakanet skall inte placeras mellan Pink Pad och operationsbordets madrass.

xodus
medical, inc.
Making Surgery Safer™
xodusmedical.com • info@xodusmedical.com



MADE IN THE
USA
FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

**OPT OPERATIONS
INSTRUMENT**

Operations Instrument AB

Lejonvägen 14 Direct +46 85448119
Box 1183 Office +46 854481190
SE-181 23 Lidingö Mobil +46 708591668
my@opi.se www.opi.se