

Bruksanvisning: JACKSONBORD

(setet innehåller eventuellt inte alla nedan nämnda produkter)

- ① Placera vardera armstöd på motsvarande armbordskudde (V&H), och säkerställ att utskärningarna är vända utåt för att stödja hela armen.
- ② Placera torsolyftskyddet säkert över bröstkudden. Vid användning av DermaProx-skydd, säkerställ att DermaProx-lagret är vänt uppåt för direkt hudkontakt
- ③ Placera höft-/lårskydden säkert över de fyra höft- och lårkuddarna. Vid användning av DermaProx-skydd, säkerställ att DermaProx-lagret är vänt uppåt för direkt hudkontakt.
- ④ Centra huvudstödet på huvudbordet och säkerställ att huvudstödet ovals öppning är korrekt inriktad ovanpå bordet med DermaProx-lagret vänt uppåt.

