



Bruksanvisning för Nasotracheal tubs fixation- NTL

- 1-2** Placera NTIns främre del på pannan och nackremmen över nackens utskott (occipital protuberance). Fäst nackremmen mot den fyrkantiga kardborredelen
- 3** Öppna den yttre fixeringsremmen för tuben genom att dra av remmen från kardborrebandet, som då ger tillgång till den inre fixeringen

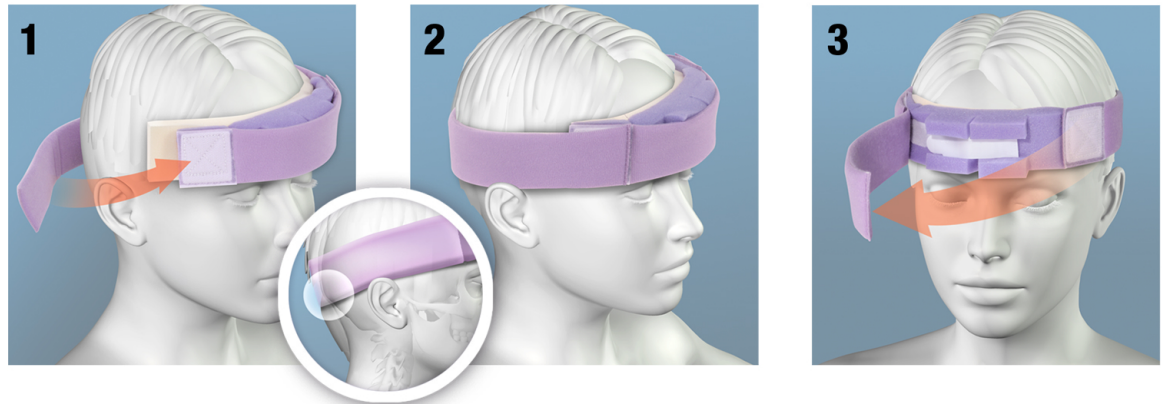

- 4** Öppna det inre fixeringsbandet med kardborreband för att få åtkomst till den självhäftande ytan
- 5** Tag bort skyddsfilmen till den självhäftande ytan (se bild)
- 6** Placera tuben i fåran av skumplasten, tryck tuben mot den självhäftande ytan för att fixera (se bild)

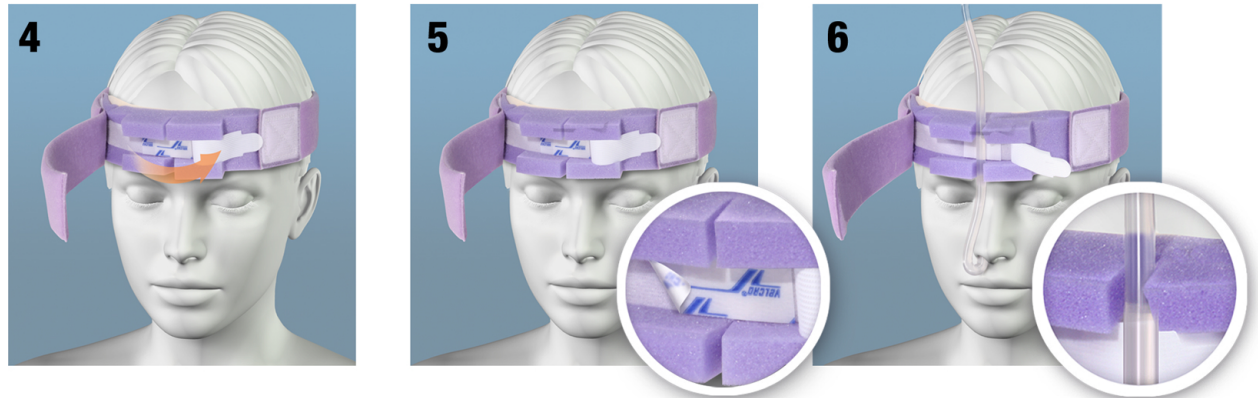

- 7** Fixera tuben med det inre kardborrebandet
- 8** Tuben är nu fixerad i NTL
- 9** Stäng den yttre fixeringsremmen genom att fästa den till kardborrebandet. Kontrollera att nackremmen inte är fixerad över öronen och att de inte är klämda, gör eventuella justeringar av remmen (se bild)

