

Andrewsbord-Manual

1. Placera vartdera armstödet på motsvarande armbordskudde (vänster & höger), och säkerställ att utskärningarna är vända utåt för att stödja hela armen.
2. Placera torsolyftskyddet noggrant över bröstkudden. Vid användning av DermaProx-skydd, säkerställ att DermaProx-lagret är vänt uppåt för direkt hudkontakt.
3. Centrera huvudstödet och säkerställ att huvudstödet ovals öppning är korrekt placerad högt upp bordet med DermaProx-lagret vänt uppåt.
4. Placera knäkudden direkt på knästödet.
5. Placera sätesdraperingen över säteskudden. Vid användning av DermaProx-skydd, säkerställ att DermaProx-lagret är vänt uppåt för direkt hudkontakt.
6. Använd höftremmen för att säkra patienten vid säteskudden; säkerställ att en del är ovanför och att en del är under staget.
7. När patienten placerats på Andrews ryggbord sätter du fast hälskydden på patientens fötter. Säkra hälskydden på plats med hälskyddsremmarna.

