


Bruksanvisning: Huvudstöd

Användningsområde: Ryggläge och ryggläge med lateral tilting

Ryggläge: Placera huvudet på huvudstödet, justera så att patienten upplever en bekväm position, om behov finns tag bort den utstansade delen i huvudstödet, se bilden ovan så att nackbenet (os Occipital) placeras i den utstansade delen. Huvudstödet ger även bra stöd vid lateral tippning av operationsbordet.

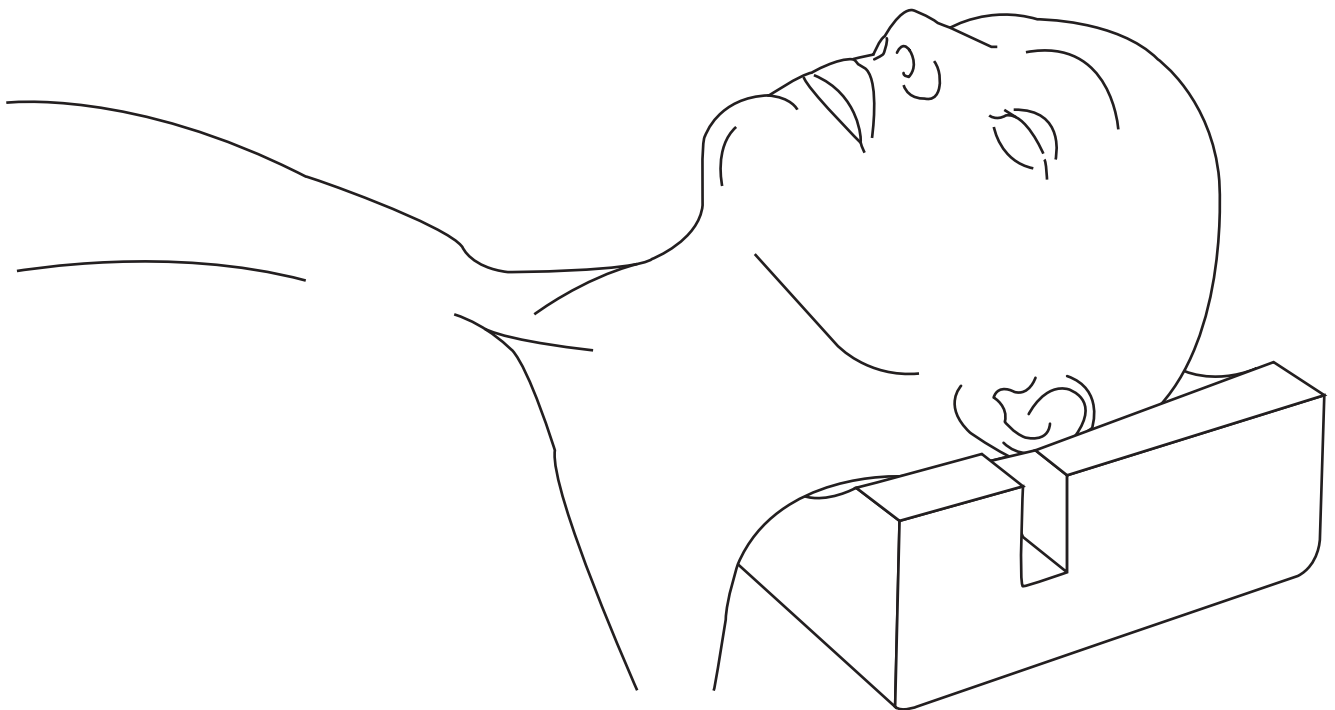

Bruksanvisning: Huvudstöd

Användningsområde: Sideläge och sidoläge med lateral tilting

Lateralt läge: Huvudstödet kan användas både vid höger- och vänstersidigt lateralt läge. Tag bort den utstansade mittendelen av huvudstödet. Placera huvudet på höger eller vänster sida. Placera huvudet, så att örat ligger i håligheten. Placera intubations tuben i den längsgående skåran på huvudstödet. Huvudstödet ger bra stöd åt huvudet i lateralt läge.

