

Hurtigmanual Zoom EX (5.0) HMS NR:194278



Lesefunksjoner

Start / stopp kamera:

Skann og les:

Pause / Fortsett lesing:

Les tegn for tegn:

Les ord for ord:

Les setning:

Les avsnitt:

Mellomrom

E

X

Pil høyre / pil venstre

Ctrl + pil høyre / pil venstre

Pil opp / pil ned

Ctrl + pil opp / pil ned

Talefunksjoner

Øk lesehastighet:

Reduser lesehastighet:

Les sidebeskrivelse:

Stopp talen:

Shift + Q eller F9

Shift + Z eller F8

Shift + E

Ctrl

Utseende

Øk forstørrelse / reduser forstørrelse:

Formatert tekst av / på:

Bytt farger:

Bytt skarphet:

Roter bilde 90 grader:

Vis / Skjul oversiktsbilde i lese-TV modus:

Juster hastighet for linjemodus:

XY-bord funksjon

(Legg merke til at funksjonen for XY-bord må være aktivert i innstillingsmenyen)

+ / -

F2 eller F

F3 eller C

F4 eller S

F6 eller R

F5 (or V)

punktum / komma eller < / >

piltastene



Når kamera er på

Lys av / på:

Ctrl + L

Juster lysstyrke:

punctum / komme eller < / >

Bytt mellom skannemodus og lese-TV modus:

Y

(Legg merke til at kameraet må startes igjen (mellomrom) ved byte fra lese-TV modus til skannemodus)

Avbryt kommando:

Escape

Bokfunksjoner

Ny bok:

Alt + B

Åpne bok:

Alt + B + O

Legg til side:

A

Neste side:

N

Forrige side:

P

Kontaktinformasjon

ProVista AS
Tromøyveien 24
4841 ARENDAL

mail@provista.no
www.provista.no

Tlf: 22696100
Fax: 37058687

PROVISTA
spesialoptikk