


# Hurtigmanual Eye-Pal Rol

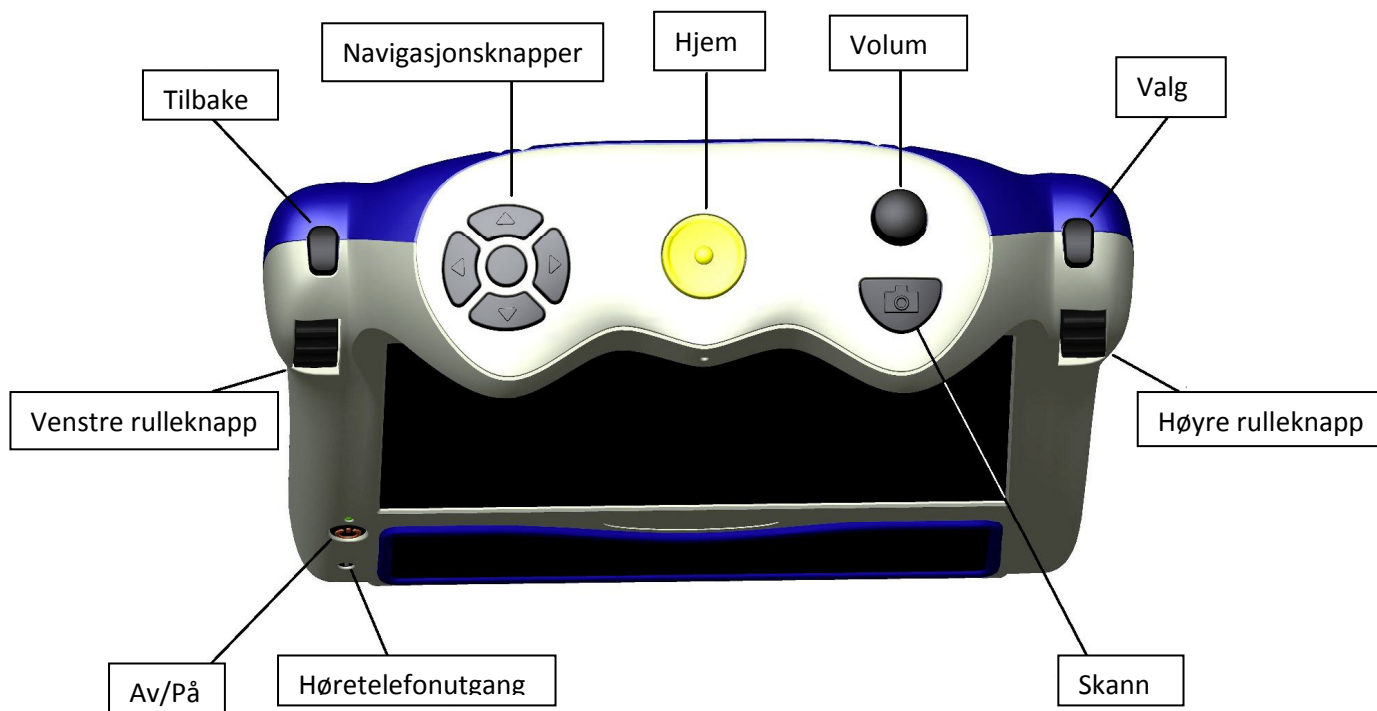

## Hjem-tasten:

En stor, rund tast midt på oversiden av maskinen. Trykk på tasten når som helst for å komme til hovedmenyen

## Volum-tasten:

Du finner tasten i øverste høyre hjørne, på oversiden av maskinen. Bruk tasten for å øke eller senke lydstyrken.

## Navigasjons-taster:

Du finner tastene på venstre side, på oversiden av maskinen. Det er i alt fem navigasjons-taster - 4 piltaster + en tast plassert i midten av piltastene.

## I Skanne- og lesemodus:

-Trykk på den runde tasten midt i piltastene for å stoppe/fortsette opplesing.

--Trykk på Pil venstre for å lese forrige ord

--Trykk på Pil høyre for å lese neste ord

--Trykk på Pil opp for å gå til begynnelsen av teksten

--Trykk på Pil ned for å gå til slutten av teksten

**Valg-tasten:**

Plassert på høyre side av maskinen, over Høyre rulleknapp.

Trykk på denne tasten for å velge i menyene.

I Opplesingsmodus – Tasten brukes for å stoppe/fortsette opplesing.

**Høyre rulleknapp:**

Plassert på forsiden av maskinen, ytterst til høyre.

Rull opp og ned med knappen for å bla i menyen.

I opplesingsmodus – rull opp eller ned for å gå til forrige eller neste linje

**Venstre rulleknapp:**

Plassert på forsiden av maskinen, ytterst til venstre.

Rull med tasten for å gjøre bilder og skrift større og mindre på en tilkoblet ekstern skjerm

**Skanne-tasten:**

En halvsirkelformet tast plassert til høyre, på oversiden av maskinen, foran volumtasten.

**Tilbake-tasten:**

Plassert over Venstre rulleknapp.

Trykk på tasten for å gå tilbake til forrige oppføring i menyen.

**Tilbake-tasten + Valg-tasten:**

Ved å trykke på Valgtast og Tilbake-tast samtidig når maskinen er i Skanne- og lesemodus, slås Lagre-funksjonen på. Når funksjonen er på kan du lagre nye bøker og dokumenter eller hente fram og lese lagret informasjon på nytt.