


Hurtigmanual SmartView Synergy (basic)

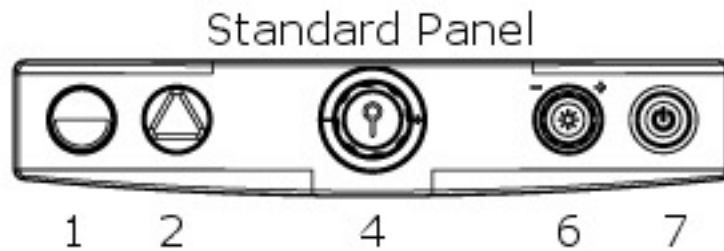

1. Økt kontrast-knapp
2. Fargebilde-knapp
3. Zoom-hjul
4. Lysstyrke-hjul
5. Strømbryter

Beskrivelse av knapper på kontrollpanelet

Strømbryter: Strøm-knappen er siste knapp på høyre side. Den brukes for å slå SmartView Synergy av og på. Når strømmen er på vil lyset over XY-bordet tennes og strøm-knappen lyse grønt.

Økt kontrast: Knappen for økt kontrast er første knapp på venstre side. I modus for fargebilde, bruk knappen for å slå på økt kontrastmodus. Farger med økt kontrast kan gjøre det lettere å lese tekst. Synergy SI lar deg lese teksten med ulike kombinasjoner av farger. Se brukermanual for mer informasjon.

Fargebilde-knapp: I modus med økt kontrast, bruk knappen for å slå på fargebildemodus. I denne modus vil bildende vises med fulle farger.

Zoom-hjul: Brukes for å forandre forstørrelsen. Vri hjulet med klokka for å øke forstørrelsen og mot klokka for å redusere forstørrelsen. Det er 24 ulike grader av forstørrelse.

Lysstyrke-hjul: Brukes til å forandre på lysstyrken. Vri knappen med klokka eller mot klokka for å øke eller redusere lysstyrkenivå. Separate lysstyrkenivåer lagres for modiene økt kontrast og fargebilde.



PROVISTA
spesialoptikk