


Hurtigmanual, kontrollpanel

MagniLink Student Professional

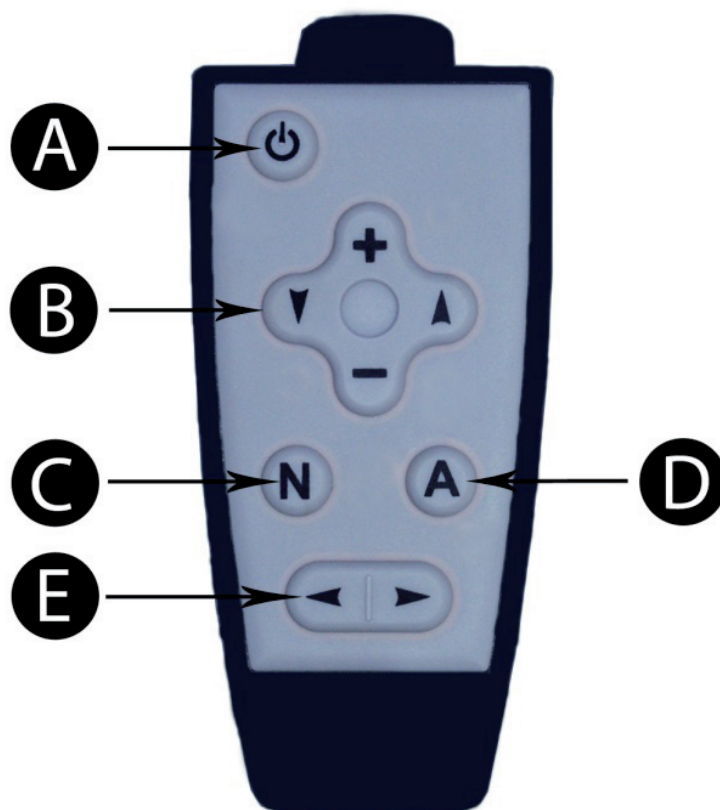

- A** På/ Av (standby)
- B** Endre zoom (+/-) og kontrast (piler)
- C**
 - a) Naturlige farger
 - b) **Bildeformatbytte*** (Denne funksjonen benyttes kun når en ekstern monitor er tilkoblet).
- D** **Kunstige farger*** Trykk A for å endre farger
- E** Referanselinje

Hurtigguide, funksjoner

MagniLink Software Tastaturfunksjoner



Taster/kommandoer	Funksjon	Taster/kommandoer	Funksjon
F1	Naturlige farger	Ctrl + Pil venstre	Referanselinje venstre / opp
F2	Positivt bilde med økt kontrast	Ctrl + Pil opp	Referanselinje venstre / opp
F3	Negativt Positivt bilde med økt kontrast	Ctrl + Pil høyre	Referanselinje høyre / ned
F5	Ta "snapshot" (screenshot)	Ctrl + Pil ned	Referanselinje høyre / ned
Shift + F5	Ta "snapshot" – hurtigt	Ctrl + A	Aktivere / deaktivere alltid på topp
Ctrl + F5	Start / slutt videooptak med lyd	Ctrl + L	Tilbakestille språkvalg
Ctrl + Shift + F5	Start / slutt videooptak med lyd – hurtigt	Ctrl + M	Minimere programvindu til aktivitetsfeltet
F6	Visningsmodus "snapshots"	Ctrl + R	Roter kamerabildet til høyre
Ctrl + F6	Visningsmodus video	Ctrl + Shift + R	Roter kamerabildet til venstre
Shift + F6	Direkte vis siste "snapshot"	Ctrl + C	Aktivere / deaktivere grensesnittet for skjermmfor størrelse
Ctrl + Shift + F6	Direkte Vis siste video	Ctrl + Alt + S	Global hurtigkommando (rask aktivering av MLS)
F8	Forhåndsinnstilte bildedelemoduser		
F9	Informasjon og innstillinger vindu		
F11	Gjenopprett standarder		
Pil opp	Zoom in		
Pil ned	Zoom ut		
Pil høyre	Øk lysstyrke		
Pil venstre	Reducer lysstyrke		