

### Kommandoikoner



Skann til et nytt tekstvindu



Skann og tilføy



Lagre en fil



Start lesing



Stopp lesing midlertidig

Pauseikonet erstatter startikonet under lesing.



Stopp lesing



Reduser tekststørrelse



Øk tekststørrelse



Innstillinger

## Hurtigtaster

Skann et dokument	F2
Skann og tilføy	F3
Åpne	Ctrl + O
Lagre som	Ctrl + S
Lukk vindu	Ctrl + F4
Avslutt program	Ctrl + Q
Start lesing	Ctrl + 1
Stopp lesing midlertidig	Ctrl + 2
Stopp lesing	Ctrl + 3
Les merket	Ctrl + 4
Stav merket	Ctrl + 6
Foregående ord	Ctrl + 5
Neste ord	Ctrl + 7
Start lesing ved markør	Ctrl + 8
Øk tekststørrelse	Ctrl + "+"
Reduser tekststørrelse	Ctrl + "-"
Ordrulling	F4
Inverter tekst	Ctrl + I
Innstillinger	F9
Side ved side horisontalt	Ctrl + F5
Side ved side vertikalt	Ctrl + F6
Overlappet	Ctrl + F7
Minimer alle	Ctrl + F8
Maksimer aktivert	Ctrl + F9