


Hurtigmanual, kontrollpanel

MagniLink Vision Skole

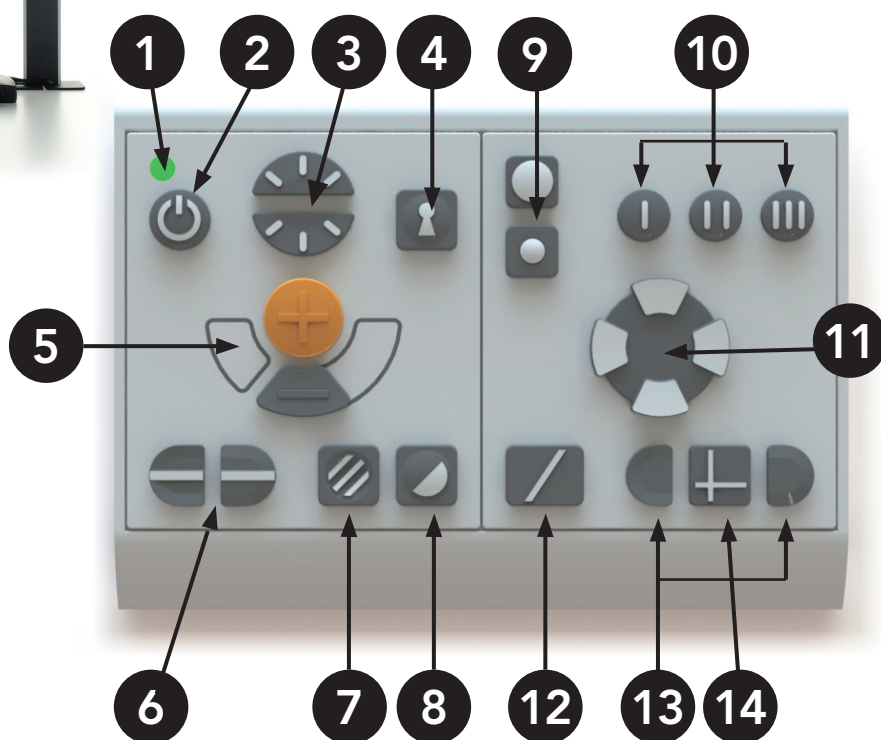


- | | | | |
|----------|----------------------------|-----------|----------------------------------|
| 1 | LED-indikator | 8 | Høykontrastmoduser |
| 2 | Strøm av/på | 9 | Kameravalg |
| 3 | Justering av kontrast | 10 | Egendefinerte innstillinger |
| 4 | Autofokus av/på | 11 | Panorering av avstandskamera |
| 5 | Forstørrelsesknapper (+/-) | 12 | Bildedelingsinnstillinger |
| 6 | Referanselinje/Persienner | 13 | Justering, bildedelingsstørrelse |
| 7 | Bildemodus/gråskala | 14 | Bilddeling horisontell/vertikal |

Lær mer om våre produkter på www.provista.no.

Kontakt ProVista på telefon +47 37 05 86 86 hvis du trenger hjelp med produktet.

Hurtigmanual, X/Y-bord MagniLink Vision Skole

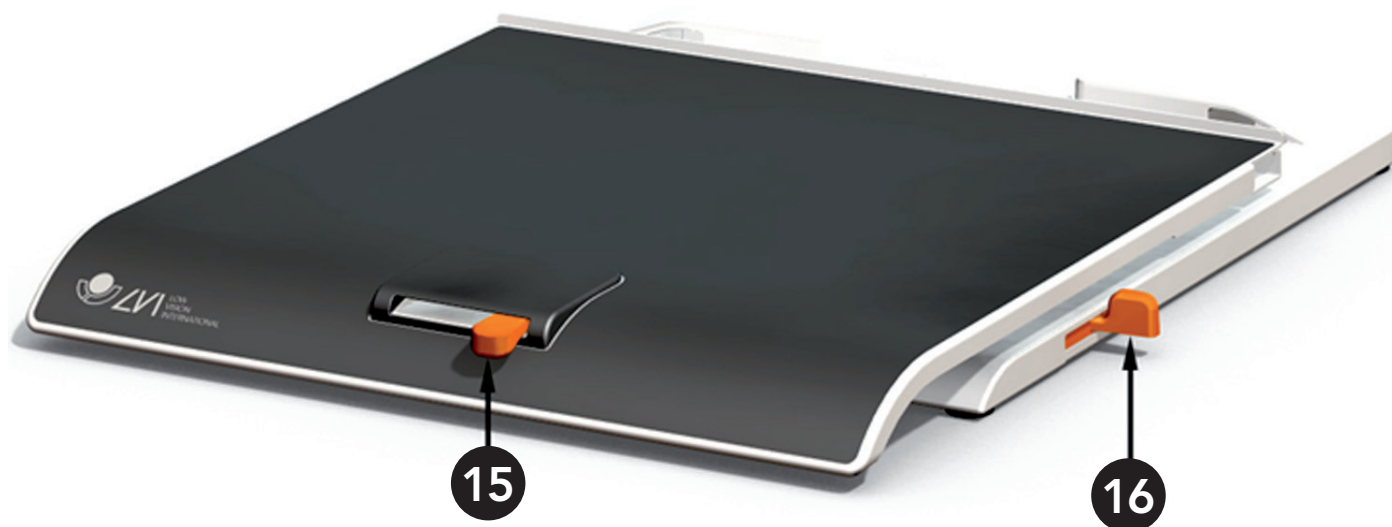

15 Justering av sidefriksjon

Flytt låsespaken til venstre for å redusere sidefriksjonen. Flytt låsespaken til høyre for å øke / låse sidefriksjonen.

16 Justering av dybdefriksjon

Flytt låsespaken fremover mot deg for å redusere dybdefriksjonen. Flytt låsespaken bakover for øke / låse dybdefriksjonen