


Hurtigmanual, kontrollpanel

MagniLink Vision Split

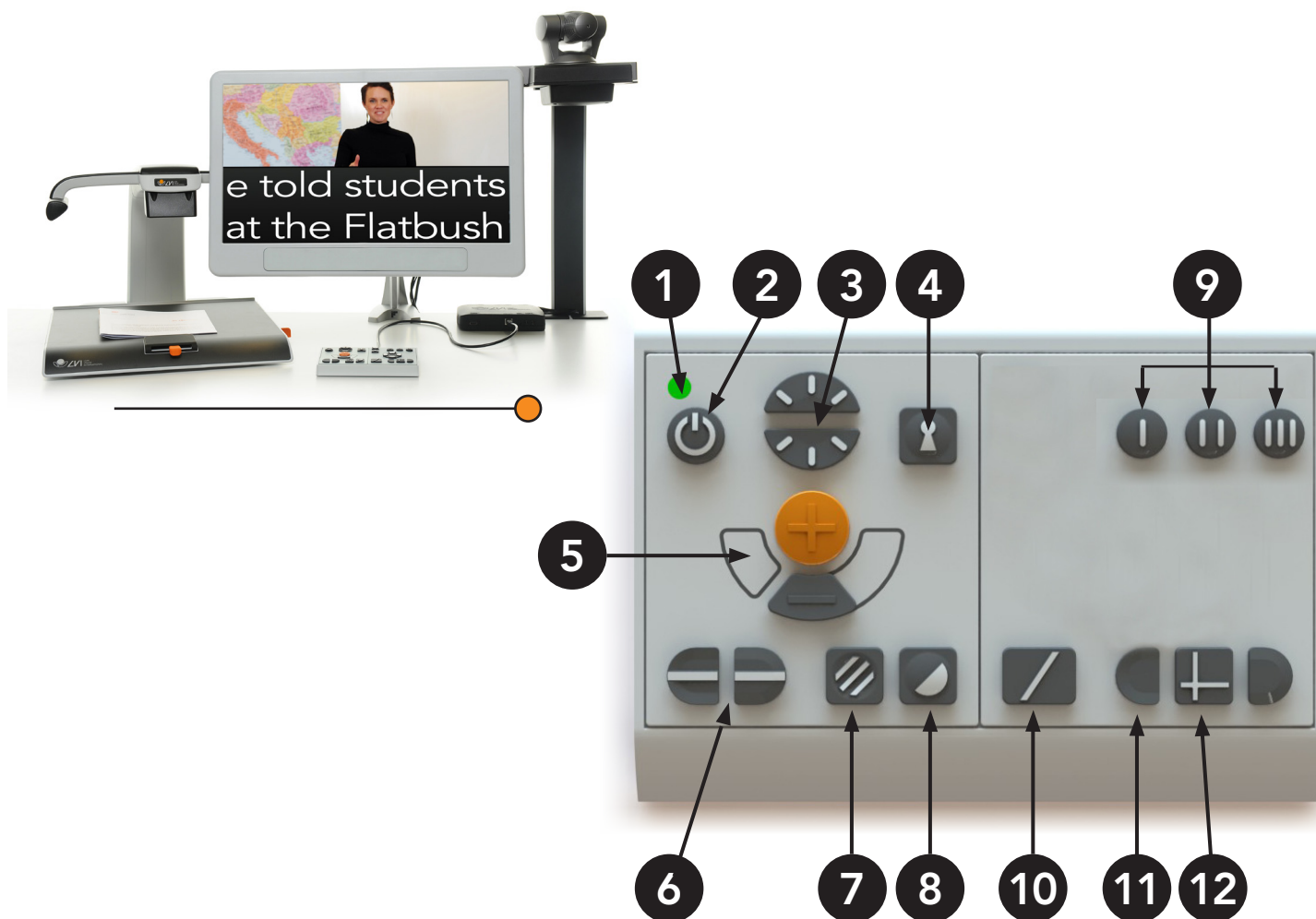


- | | | | |
|----------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 | LED | 7 | Bildemodus/gråskala |
| 2 | Strøm av/på | 8 | Høykontrastmoduser |
| 3 | Justering av kontrast | 9 | Egendefinerte innstillinger |
| 4 | Autofokus av/på | 10 | Bildedelingsinnstillinger |
| 5 | Forstørrelsesknapper (+/-) | 11 | Justering av bildedeling |
| 6 | Referanselinje/Persienner | 12 | Horisontalt/vertikalt delt skjerm |

Lær mer om våre produkter på www.provista.no.

Kontakt ProVista på telefon +47 37 05 86 86 hvis du trenger hjelp med produktet.

Hurtigmanual, X/Y-bord MagniLink Vision Split

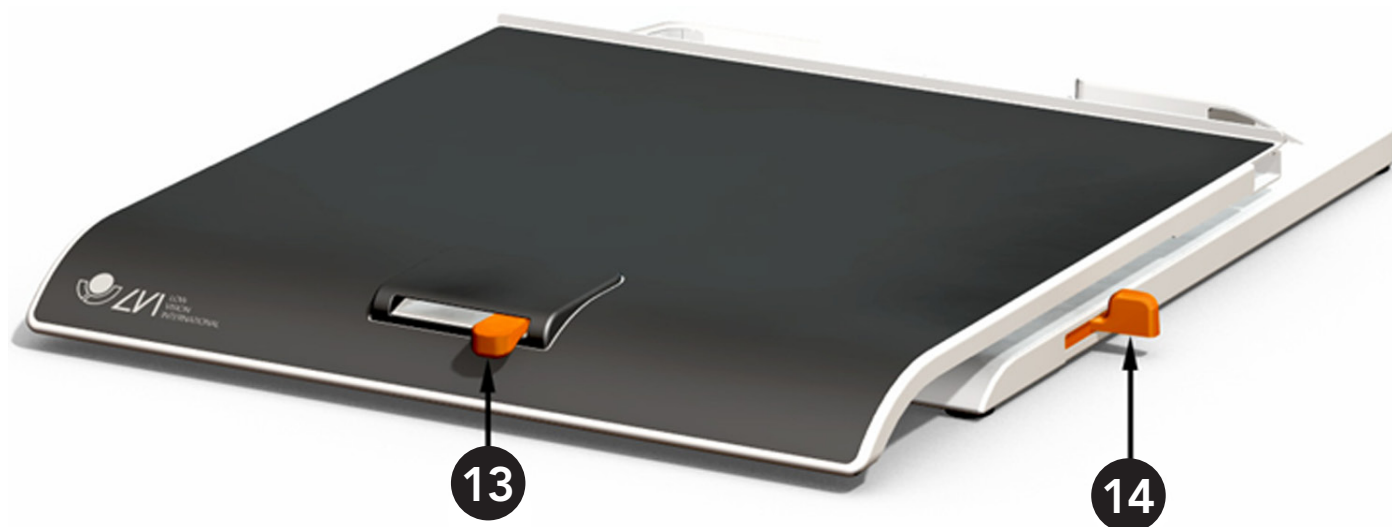

13 Justering av sidefriksjon

Flytt låsespaken til venstre for å redusere sidefriksjonen. Flytt låsespaken til høyre for å øke / låse sidefriksjonen.

14 Justering av dybdefriksjon

Flytt låsespaken fremover mot deg for å redusere dybdefriksjonen. Flytt låsespaken bakover for øke / låse dybdefriksjonen.