


Reporter Smart.

Kom igang.

Så snart du begynner å bruke Reporter Smart vil du oppdage at denne maskinen har noen helt spesielle fordeler: Reporter Smart er lett å bruke, den inneholder spesielt god teknologi for å gjenkjenne tekst og utrolig god kvalitet på oppløsning av teksten.

Kontrollpanelet.

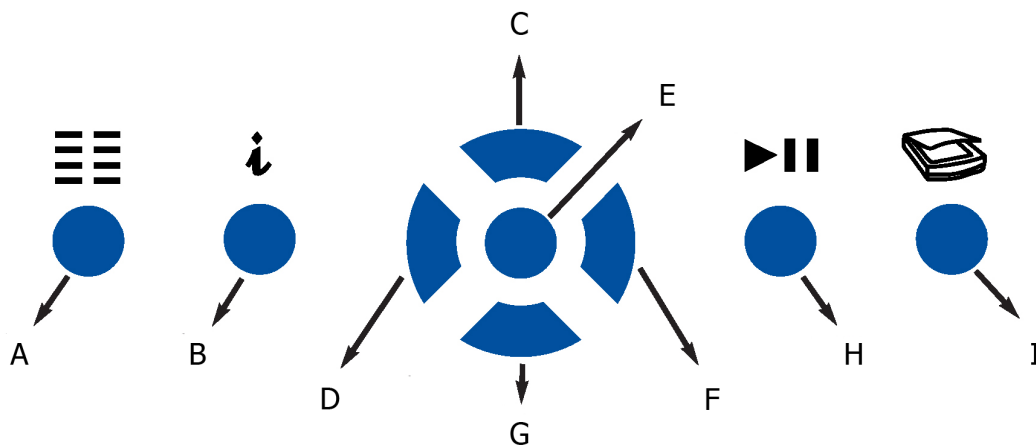

- A : Første fra venstre: **KOLONNEGJENKJENNING.**
- B : Andre fra venstre: **HJELP.**
- En grOPPPe med fem taster midt på panelet:
 - **C : OPP.** Dette er øverste tast i grOPPPen.
 - **D : TILBAKE.** Dette er venstre tast i grOPPPen.
 - **F : FRAM.** Dette er høyre tast i grOPPPen.
 - **G : NED.** Dette er nederste tast i grOPPPen.
 - **E : STAVE.** Dette er midterste tast i grOPPPen.
- H : Andre fra høyre: **PAUSE.**
- I : Første fra høyre: **SKANN OG LES.**

Reporter har to brukergrensesnitt: Enkel modus og avansert modus. Så lenge du bruker Reporter bare til å skanne og lese enkle dokumenter og så bla i dem, anbefaler vi at Reporter står i Enkel Modus. I enkel modus er alle avanserte funksjoner utilgjengelige.

Bytt til Enkel Modus ved å holde tastene Fram og Tilbake nede i ca 10 sekunder. Hold til du hører en kort pipetone. Deretter forteller Reporter at den nå er satt i Enkel Modus. Bytt tilbake til avansert modus på same måte – hold need Fram og Tilbake i ca 10 sekunder. Når Reporter slås av, lagres den modus Reporter er stilt inn i. Reporter vil følgelig starte i samme modus som den er slått av i.

Grunnleggende Funksjoner.

Funksjon.	Tastekombinasjon.
Slå på.	Trykk kort på AV/PÅ-tasten .
Skann og les opp.	Trykk kort på SKANN OG LES .
Pause eller fortsett opplesing.	Trykk kort på PAUSE .

Bla i teksten.

Funksjon.	Tastekombinasjon.
Les forrige ord.	Trykk kort på TILBAKE .
Les Neste ord.	Trykk kort på FRAM .
Les forrige setning.	Trykk kort på OPP .
Les Neste setning.	Trykk kort på NED .

Flere Funksjoner.

Funksjon.	Tastekombinasjon.
Les raskere.	Trykk kort på STAVE + OPP .
Les langsommere.	Trykk kort på STAVE + NED .
Stave dette ordet eller tallet.	Trykk kort på STAVE .
Slå gjenkjenning av kolonner på eller av.	Trykk kort på KOLONNEGJENKJENNING .
Slå tastehjelp på eller av.	Trykk kort på HJELP .
Bytt mellom Reporter Enkel og Avansert modus.	Trykk på og hold inne TILBAKE + FRAM i ca 10 sekunder.

Reporter Smart er den mest allsidige lesemaskinen som fines i sitt slag. Benytt brukerveiledningen dersom du også ønsker å lære mer om Reporters mer avanserte funksjoner.