

Sensotec Reporter BASIC

Manual for: ENKEL bruker funksjoner

lesemaskin for trykt tekst



Bruker manual version 3.0
Oktober 2008

Om Reporter

Så fort du starter å bruke Reporter, vil du legge merke til den enkle bruken, den gode tekstgjenkjenningen, kvaliteten og den behagelige og tydelige stemmen gjør Reporter til den beste lesemaskin på markedet.

Reporter er bygd for å dekke dine behov til lesing av dokumenter på en behagelig og enkel måte.

Resultatet av skanningen kommer er avhengig av hvor godt trykk det er mann skanner. Reporter klarer også f. eks drosje kvitteringer. Håndskrift, bilder, grafiske illustrasjoner, logoer etc kan ikke gjenkjennes. Aviser og store ark kan leses men det kan være vanskelig å brette avisen eller arket slik at man får med den teksten man ønsker.

Vedlikehold

Tørk av skanner glasset med f.eks. isopropyl alcohol eller rødsprit. Ingen andre vaske eller rensemidler skal brukes.

Prøv alltid å transportere Reporter i original esken. Ikke kast esken!


Plasser alltid Reporter på et egnet sted som er flatt og rett f.eks på bordet. Påse at det alltid er minst 10cm rundt Reporter slik at den får nok kjøling.

Sensotec Reporter: Hvordan ser den ut?

Oversikt


- Skanner lokk: på toppen av Reporter.
- Strømforsyning: på baksiden av Reporter.
- Ventilasjons riller: på høyre og venstre side av Reporter.
- Betjeningspanel: på skrådelen i front av Reporter.
- Front panel: vertikale delen i front av Reporter.
- Hovedstrømsbryter: bak på Reporter, rett over strømforsyningen.

Betjenings panel

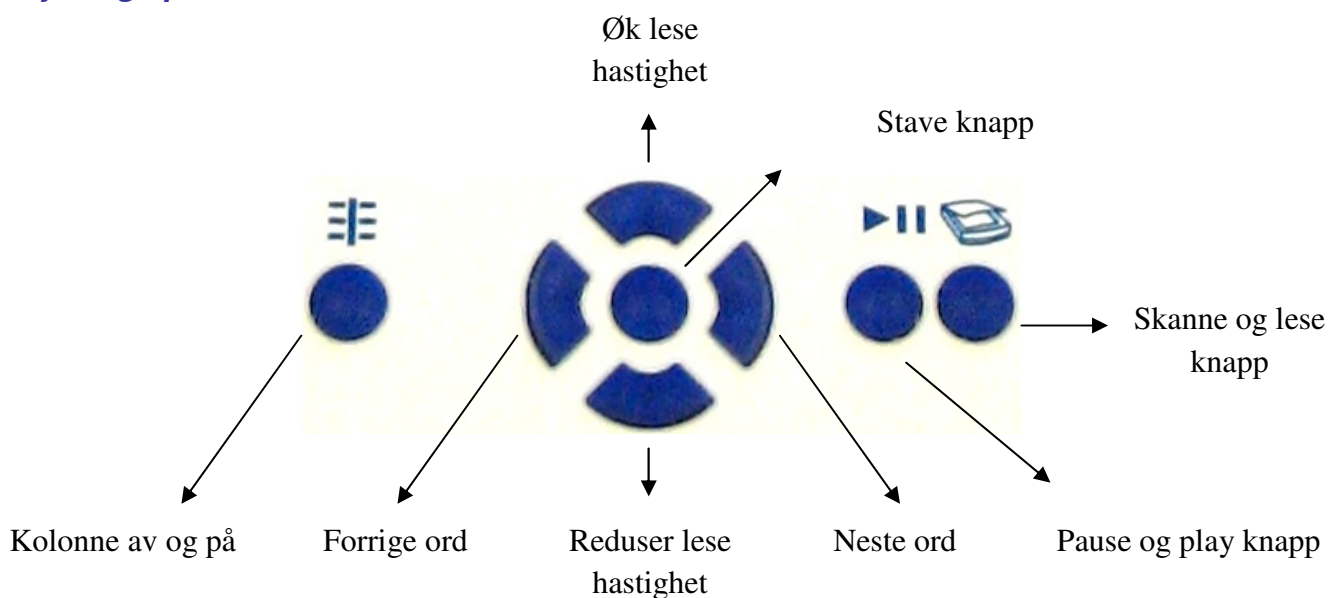

- Øverst til venstre: kolonne av og på.
- Lengst til høyre: skanne og lese knappen.
- Nest ytterst til høyre: pause og play knappen.
- De 5 knappene i midten er:
 - OPP: knappen som peker oppover.
 - NED: knappen som peker nedover.
 - BAKOVER: knappen som peker mot venstre
 - FORROVER: knappen som peker mot høyre.
 - STAVE: knappen i midten.

Front panel

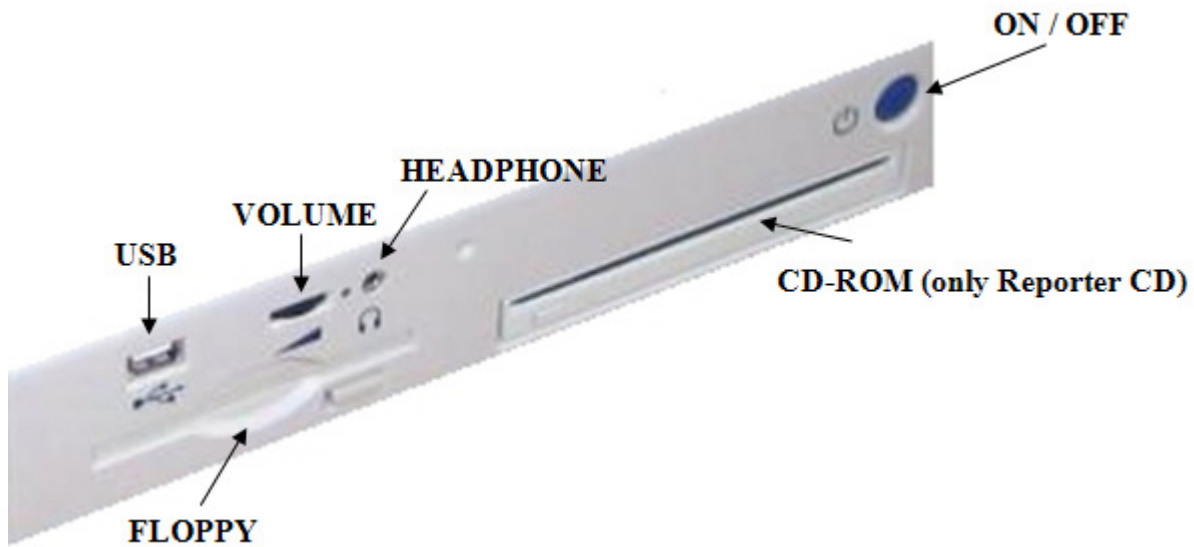

- Knappen helt til høyre: av og på knappen.
- Nest ytterst til høyre: volum hjul.
- I midten: hode tlf utgang.
- Hullet helt til venstre: USB port.
- Nederst til venstre: diskett stasjon. Denne er beregnet for service personell.
- Nederst til høyre: CD-ROM stasjon. IKKE PÅ BASIC maskinene.

Komme i gang

Koble til Reporter

Sett i strømkontakten bak og plugg den inn i strømkontakt i veggen.

Skrub av og på Reporter

Trykk kort på av og på knappen.

Du vil nå høre maskinen starte, vent til du hører “velkommen til Sensotec Reporter”.

Trykk på av og på knappen igjen og maskinen skrur seg av, du vil da høre: “Sensotec Reporter skrur seg av”.

Hvordan legge tekst på skanner

Løft opp lokket til Reporter. Legg arket med teksten ned mot glassplaten til skanneren og lukk lokket.

Trykk på skanne knappen.

Vent en stund og maskinen vil begynne å lese automatisk når den har gjenkjent siden.

Tips:

- Hvis du har lagt på en side feil vei vil maskinen si: “siden er tom” da åpner du lokket og snur siden og trykker skanne knappen igjen.
- Hvis du skanner tykke bøker trenger du ikke legge på lokket, du kan bare trykk boken ned mot skanneren og vente til den har skannet siden..
- Dette er alt du trenger å gjøre, maskinen vil fortelle deg hvilken vei arket/boken ligger.
- Hvis du skanner 2 sider av en bok vil den lese fra riktig side uansett, det vil si at du kan skanne 2 sider av en bok samtidig.

Pause og fortsette lesingen

Trykk pause knappen for å stoppe lesingen, trykk pause knappen for å fortsette lesingen.

Opp og stave knappen under lesing

Trykk opp og stave knappen for å øke lesehastigheten. Hver gang du trykker opp knappen øker du lesehastigheten med ca 10 ord i minuttet.

Ned og stave knappen under lesing

Trykk ned og stave knappen for å senke lesehastigheten. Hver gang du trykker på ned knappen minsker du lesehastigheten med ca 10 ord i minuttet.

Forrige ord: trykk bakover knappen

Trykk på bakover knappen og maskinen leser forrige ord i teksten Trykk pause så vil lesingen fortsette.

Neste ord: Trykk forrover knappen

Trykk på forrover knappen så vil maskinen lese neste ord. Trykk på pause knappen så vil maskinen fortsette lesingen.

Stave: Trykk på stave knappen

Trykk på stave knappen så vil maskinen stave ordet eller tallet. Trykk på pause knappen så vil maskinen fortsette lesingen.

Kolonne gjenkjenning av og på knappen

Reporter gjenkjenner kolonner automatisk. Det vil si at 2 sider i en bok vil bli gjenkjent. Kolonner på et ark vil bli riktig. Tekst som ikke står i kolonne vil bli gjenkjent riktig uansett.

Du kan skru av kolonne gjenkjenning hvis du skal lese et dokument som er skrevet i kolonner men kun gir mening hvis det leses linje for linje. F.eks adresse lister, regninger, kontoutdrag etc.

Trykk kolonne gjenkjenning av og på knappen for å slå av kolonne gjenkjenning. Trykk samme knappen igjen for å slå på kolonne gjenkjenning.

Trenger du flere funksjoner?

Denne maskinen har kun de nødvendige funksjonene for å kunne lese trykt tekst.

Trenger du mer avanserte funksjoner kan dette låses opp med en hemmelig taste kombinasjon. Disse er ikke tilgjengelig som standard i denne utgaven da dette er en ENKEL utgave.

Hvis man holder nede fremover knappen og bakover knappen samtidig i over 20 sekunder vil maskinen si "standard funksjoner aktivert". Da kan man blandt annet lagre på USB stick og lese fra USB stick og man får endel andre tilleggsfunksjoner. Ønsker man å gå tilbake til ENKEL innstilling holder man nede fremover og bakover knappen igjen i over 20 sekunder.

Leverandør i Norge

ProVista AS, Tromøyveien 24, 4841 ARENDAL, Norge

Tel: +47 37 05 86 86

www.provista.no

mail@provista.no

Produsent

Sensotec nv - Gistelsteenweg 112 - BE-8490 Varsenare.

www.sensotec.be

info@sensotec.be