

Hurtigtaster for MagniLink S (med og uten OCR)

Forstørring og kontrast

Pil opp	Øk forstørringen
Pil ned	Reduser forstørringen
Pil venstre	Reduser lysstyrke
Pil høyre	Øk lysstyrke
fn + F1	Naturlige farger
fn + F2	Positivt høykontrastbilde
fn + F3	Negativt høykontrastbilde

Bilde

fn + F5	Ta et stillbilde
fn + Skift + F5	Ta et stillbilde raskt
fn + F6	Vis tatt bilde
fn + Skift + F6	Vis siste bilde
Alt + F	Fryse kamerabilde

Video

fn + Alt + F5	Starte/stoppe videoopptak
fn + Alt + Skift + F5	Starte/stoppe videoopptak raskt
fn + Alt + F6	Vis tatt video
fn + Alt + Skift + F6	Vis siste video

Referanselinje

Alt + pil venstre	Referanselinje venstre/opp
Alt + pil opp	Referanselinje venstre/opp
Alt + pil høyre	Referanselinje høyre/ned
Alt + pil ned	Referanselinje høyre/ned

Bildedeling, rotering og fokus

fn + F8	Delt skjermbilde
Alt + A	Deaktiver/aktiver "alltid øverst"
Cmd + M	Minimer til oppgavelinjen
Alt + R	Roter kamerabildet med klokka
Skift + Alt + R	Roter kamerabildet mot klokka

Alt + I	Speilvend kamerabilde
Alt + J	Aktiver/deaktiver autofokus

Oppstart og innstillinger

fn + Alt + F9	Åpne programinnstillinger
---------------	---------------------------

MagniLink S sammen med ZoomText og SuperNova

Skift + pil venstre/høyre	Juster bildedeling i vertikalt delt bilde
Skift + pil opp/ned	Juster bildedeling i horisontalt delt bilde

Hurtigtaster for MagniLink S med OCR

F4	Skann og les
Alt + F4	Skann og legg til tekst
V	Veksle mellom kameravisning og tekstvisning
B	Visningsmodus
1	Start/stopp lesing midlertidig
2	Stopp lesing
3	Les forrige
4	Les neste
5	Veksle lesemodus (tegn, ord og linje)
6	Reduser lesehastigheten
7	Øk lesehastigheten
8	Reduser lydnivå
9	Øk lydnivå
0	Bytt stemme

Cmd + C	Kopier tekst
Cmd + V	Lim inn tekst
Cmd + Alt + V	Lim inn og legg til tekst

