


# Hurtigmanual, kontrollpanel

## MagniLink Vision, 3 tryck

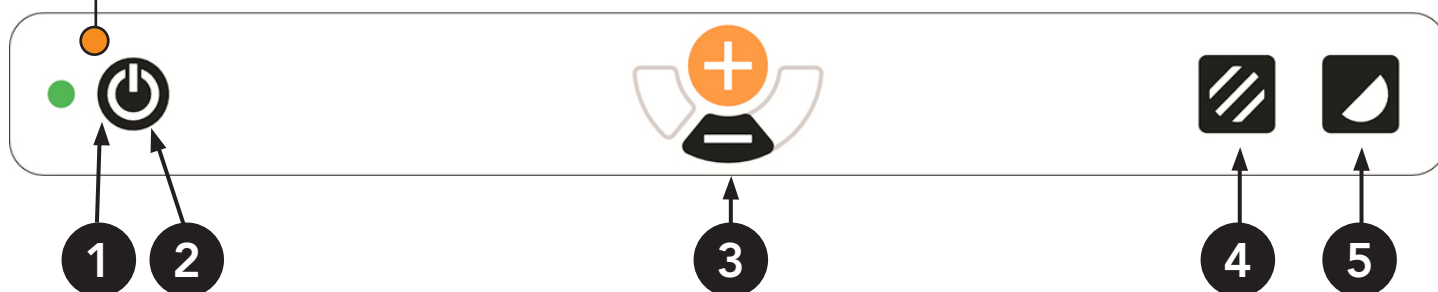

**1** LED-indikator

**2** Av/på

**3** Forstørrelsesknapper (+/-)

**4** Fargebilde/Gråtoner

**5** Høykontrastmodus med kunstige farger

Lær mer om våre produkter på [www.provista.no](http://www.provista.no).  
Kontakt ProVista på telefon 22 69 61 00 hvis du trenger hjelp med produktet.

# Hurtigmanual, X/Y-bord MagniLink Vision



## 6 Sidejustering

Flytt låsespaken til venstre for å redusere sidefriksjonen. Flytt låsespaken til høyre for å øke / låse sidefriksjonen

## 7 Dybdejustering

Flytt låsespaken fremover mot deg for å redusere dybdefriksjonen. Flytt låsespaken bakover for øke / låse dybdefriksjonen.