


# Hurtigmanual, kontrollpanel

## MagniLink Vision Skole

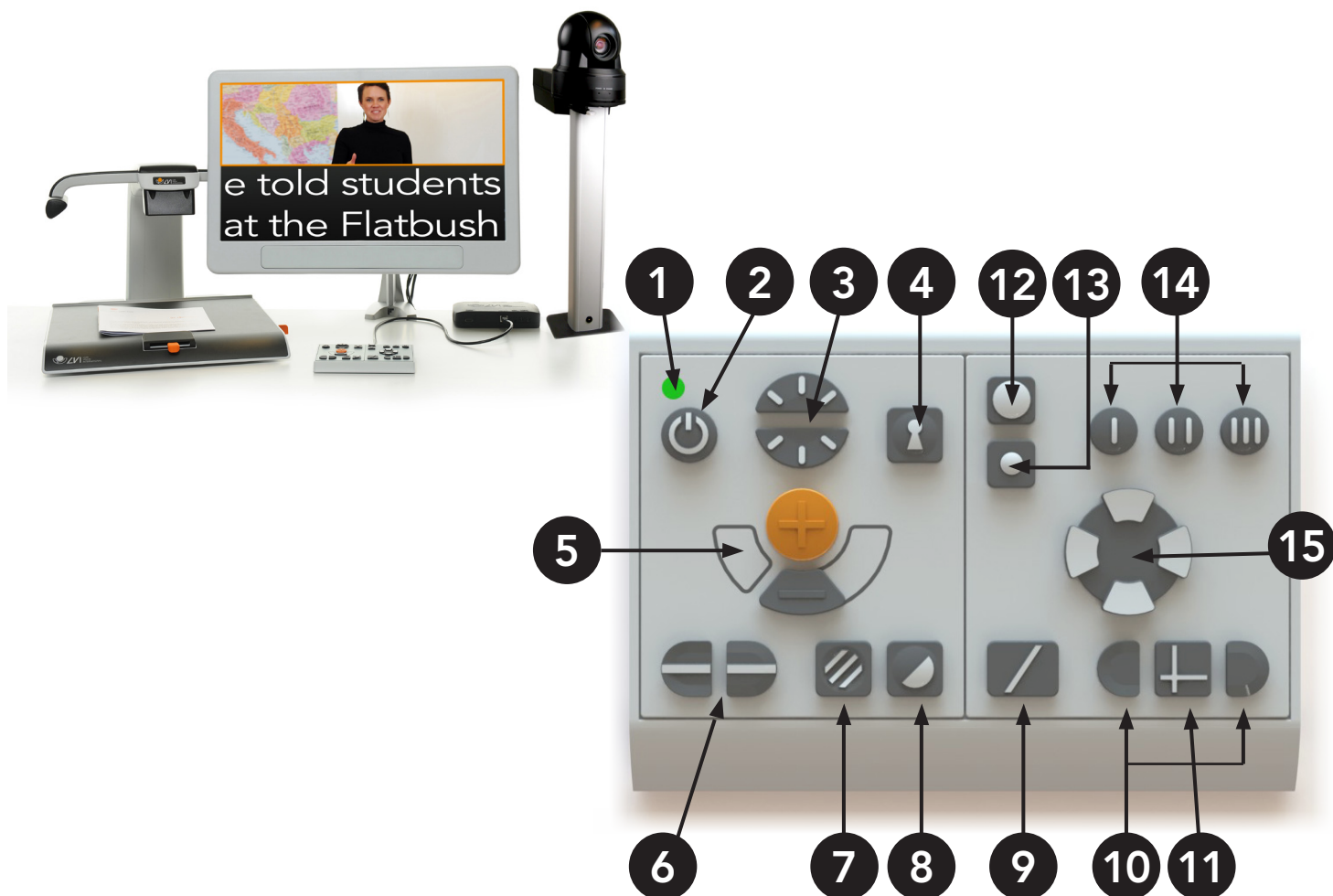

- |          |                           |           |   |
|----------|---------------------------|-----------|---|
| <b>1</b> | LED-indikator             | <b>9</b>  | Full skjerm/delt skjerm                                       |
| <b>2</b> | Strøm av/på               | <b>10</b> | Justering av delt skjerm                                      |
| <b>3</b> | Lyskonfigurasjon          | <b>11</b> | Horisontalt/vertikalt delt skjerm                             |
| <b>4</b> | Autofokus av/på           | <b>12</b> | Panorering av avstandskamera                                  |
| <b>5</b> | Forstørrelseskontroll     | <b>13</b> | Kameravalg  |
| <b>6</b> | Referanselinje/persienner | <b>14</b> | Programmert forstørrelse<br>(og retning for avstandskameraer) |
| <b>7</b> | Bildemodus/gråskala       | <b>15</b> | Justering av panorering og tilt                               |
| <b>8</b> | Høykontrastmoduser        |           |   |

# Hurtigmanual, X/Y-bord MagniLink Vision Skole



## 16 Sidejustering

Flytt låsespaken til venstre for å redusere sidefriksjonen. Flytt låsespaken til høyre for å øke / låse sidefriksjonen.

## 17 Dybdejustering

Flytt låsespaken fremover mot deg for å redusere dybdefriksjonen. Flytt låsespaken bakover for øke / låse dybdefriksjonen