

HURTIGGUIDE FOR GUIDE OG BERØRINGSSKJERM




For hjelp og support, ring 22 69 61 00,

eller send en epost til support@provista.no,

eller besøk vår kunnskapsdatabase på yourdolphin.com/support

HURTIGGUIDE FOR GUIDE OG FJERNKONTROLL

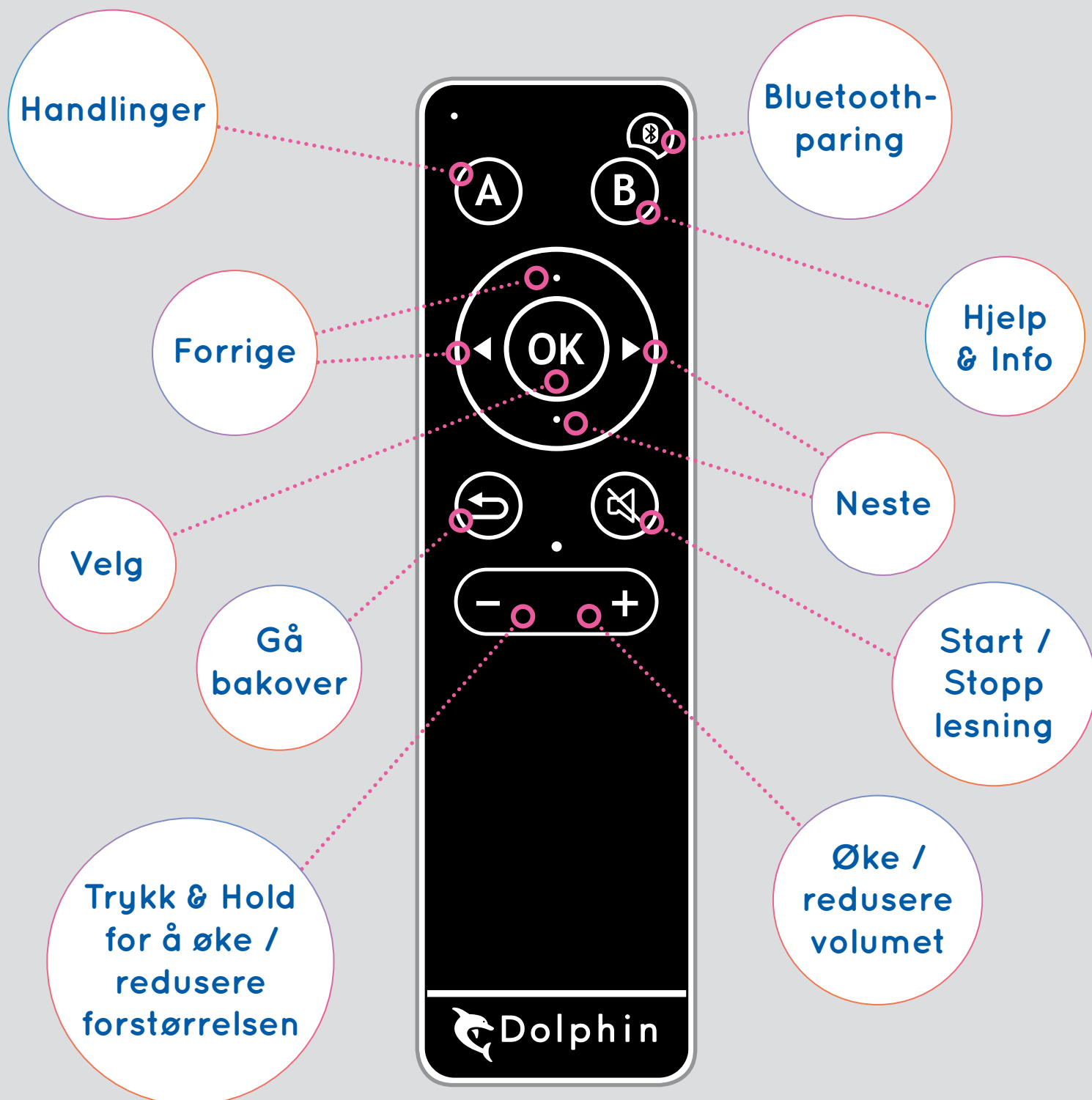

For hjelp og support, ring **22 69 61 00**,
eller send en epost til support@provista.no,
eller se kunnskapsdatabase på
YourDolphin.com/support

FLERE NYTTIGE HURTIGTASTER

Hurtigtaster i menyer

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Neste element | NED / PIL HØYRE |
| Forrige element | OPP / PIL VENSTRE |
| Velg element | ENTER |
| Tilbake til forrige skjermbilde | ESCAPE |
| Hjelp | F1 |
| Handlinger | F2 |
| Hjelp & Informasjon | F3 |
| Les aktivt element | F4 |
| Stille | CTRL |

Hurtigtaster ved skriving

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Neste / forrige ord | CTRL + PIL HØYRE / PIL VENSTRE |
| Marker tekst | SHIFT + PILTASTER |
| Kopier merket tekst | CTRL + C |
| Lim inn merket tekst | CTRL + V |
| Neste / forrige tegn | PIL HØYRE / PIL VENSTRE |

Hurtigtaster ved lesing

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Neste / forrige linje | PIL NED / PIL OPP |
| Fortløpende lesning | F5 |
| Pause | CTRL |

Hurtigtaster for Internett

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Neste / forrige element | PIL NED / PIL OPP |
| Neste / forrige tegn | PIL HØYRE / PIL VENSTRE |
| Neste / forrige ord | CTRL + PIL HØYRE / PIL VENSTRE |
| Vis bilder På / Av | CTRL + I |
| Bytt visningsmodus | CTRL + T |
| Neste Overskrift | H |
| Neste skrivefelt | E |
| Neste link | K |
| Tilbake en side | SLETT BAKOVER |

HURRIGTASTER PÅ TASTATUR



| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|---------------|-----------------|--------|-----|----|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
| Ctrl +0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
| Tale Av / På | Hjelp | Hand- ling | Hjelp & info | Gjenta | Les | ~ | Volum: Ned / Opp | Hastighet: Ned / Opp | Forstørrelse: Ned / Opp | | | |

Vennligst fjern forsiktig

Brett her og plasser bak tastaturet

Dersom du ønsker ytterligere hjelp med GuideConnect, kontakt vårt supportteam på -
22 69 61 00

eller søk på vår hjelp, support og opplæringsressurser på -
yourdolphin.com/support



Vennligst fjern forsiktig