

# MagniLink PCViewer™

– innovativ software til PC

For øget  
deltagelse -  
i skole, på arbejde  
og i hjemmet!



# MagniLink PCViewer™

MagniLink PCViewer™ er et banebrydende program, der anvendes på en PC til at vise billeder fra et MagniLink læsekamera. Programmet styrer læsekameraets egenskaber, for eksempel forstørrelse, kunstige farver og lysstyrke, og giver brugeren mulighed for individuelle tilpasninger for at opnå den bedste oplevelse.

## Funktioner i MagniLink PCViewer™:

- Forskellige farve- og lysindstillinger, f.eks. naturlige og kunstige farver.
- Forskellige forstørrelsesgrader.
- Låsbart autofokus.
- Tag og vis billeder.
- Optag og vis video.
- Spejl, roter og frys billeder.
- Automatiske opdateringer (internettet).
- Forskellige hjælpelinjer til at lette læsning.
- Flere muligheder for at ændre og tilpasse efter individuelle behov på fanen EUC (End User Configuration).
- Styring af funktionerne på forskellige måder. Enten via menuer, tastaturgenveje eller knapper på læsekameraets kontrolpanel.
- Konfiguration af egne tastaturgenveje.
- Kamerabilledet placeres øverst/foran alle åbne programmer.
- Vælg og skift mellem flere visninger.
- Kompatibel med programmerne Zoom-Text og SuperNova.

## Tilvalg:

Med tilvalgsfunktionen TTS er det muligt at OCR-behandle en tekst og få den læst højt med den indbyggede talesyntese. Den OCR-behandlede tekst kan vises i forskellige visningstilstande synkroniseret med tale. Man kan OCR-behandle tekst fra et billede, som er taget med det tilsluttede MagniLink-kamera, og det er muligt at trække andre dokumenter ind i programmet og få dem OCR behandlet. Det er muligt at gemme en OCR-behandlet tekst som en lydfil (.wav), og du kan forstørre og navigere i OCR-billedet. Det er også muligt at indsætte tekst i programmet.



Hvis du har den valgfri TTS (tekst til tale), er der også mulighed for at bruge programmet fritstående/standalone d.v.s. uden et tilsluttet læsekamera. Så kan du få allerede gemte tekst-eller billedokumenter OCR-behandlet, og læst højt af talesyntesen. Ved køb af læsekameraet MagniLink S Premium og MagniLink Pro medfølger PCViewer og hvis man tilvælger TTS indgår også standalone-funktionen. Det er også muligt at tilkøbe TTS- og standalone-funktionerne senere.

## Anbefalede systemkrav:

- Microsoft Windows 7.
- 1 integreret USB 3.0-port
- i5 eller i7 processor, 4 GB RAM, eksternt grafikkort med mindst 512 MB indbygget hukommelse.



LVI Danmark ApS  
Hørkær 24, st. tv.  
2730 Herlev, DANMARK

Tel: 57 67 20 99  
E-mail: info@lvi.dk

[WWW.LVI.DK](http://WWW.LVI.DK)