

LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5 Tel.: +46 470 – 727700

Correo electrónico: info@lvi.se

352 46 Växjö Fax: +46 470 – 727725

Internet: www.lvi.se


MagniLink Visus 4,3” manual del usuario 7944032


La primera vez que usa el producto

Le recomendamos que cargue totalmente su lupa MagniLink Visus antes de usarla por primera vez. El cargador se suministra con una serie de conectores de alimentación internacionales y usted elegir el más adecuado para su país. Colóquelo como se indica en la figura contigua y gírelo hasta que enganche en su posición.

Conecte el cable al cargador y enchúfelo al extremo del mango de MagniLink Visus (A). El indicador de carga alrededor del conector de alimentación brilla con luz roja cuando el MagniLink Visus se está cargando, y se apaga cuando la carga ha finalizado. Una carga completa lleva aproximadamente 3 horas.

La unidad se suministra con una correa de cuello que puede fijarse al extremo del mango (B) si es necesario.

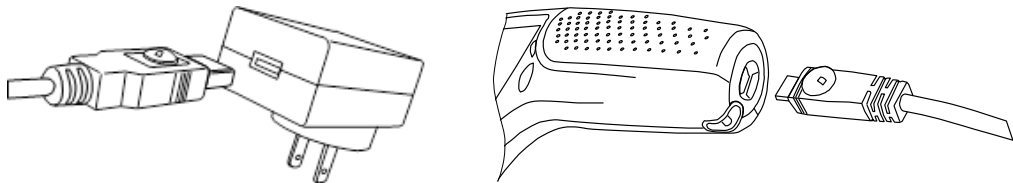

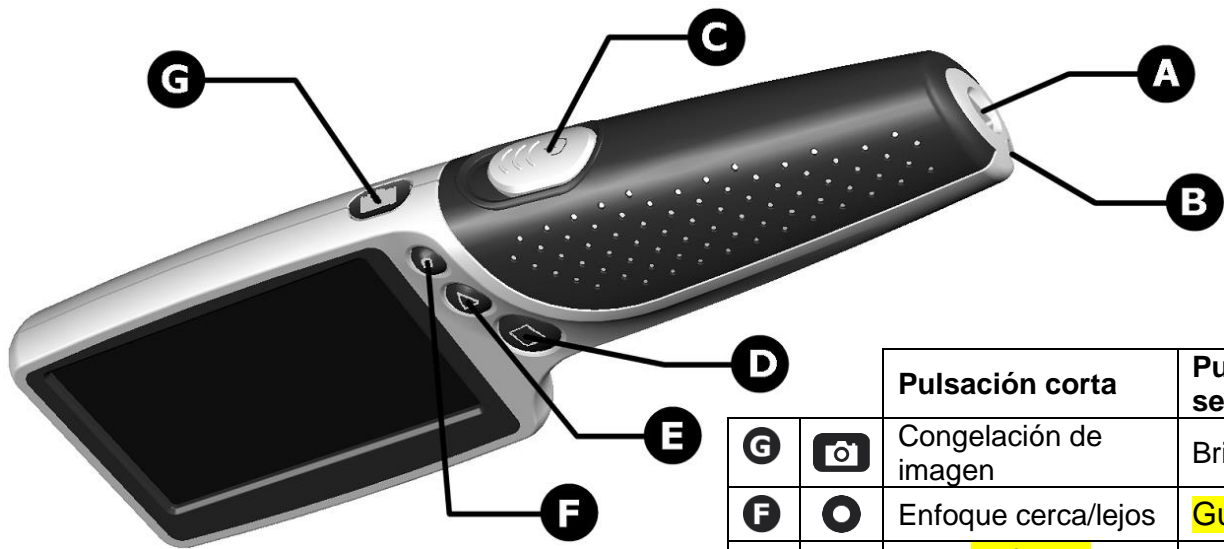


		Pulsación corta	Pulse durante 3 segundos
G		Congelación de imagen	Brillo de pantalla
F		Enfoque cerca/lejos	Guardar imagen
E		Enfoque cerca/medio/lejos	Cambiar color artificial
D		Nivel de aumento	Encender/apagar iluminación



Encendido/apagado

Deslice el interruptor (C) hacia delante para encender la unidad. Los LED en el lado inferior se iluminan y aparece una imagen en la pantalla. Coloque la unidad arriba del objeto que desea aumentar con la pantalla centrada sobre la zona de interés. Para encontrar el enfoque más nítido necesitará subir o bajar la pantalla.





Aumento

Si pulsa varias veces el botón  (D) se desplazará entre los tres niveles de aumento. Puede elegir el nivel que mejor se adapta al tamaño de texto que está viendo.



Botón de enfoque


A veces, es posible que usted quiera ubicar un área específica de interés en una página. El botón  (E) ajustará el enfoque de la lente a una mayor o menor distancia permitiéndole así alejar o acercar la unidad a la página y obtener una visión más amplia o detallada de lo que quiere leer. Pulsando el botón  alternará entre los botones de enfoque F1 (cerca) y F2 (lejos). Tenga en cuenta que hay un punto de enfoque adicional, consulte el menú de opciones en la sección siguiente.

Menú de opciones





El menú de opciones le permite seleccionar entre dos o tres niveles de enfoque. Para acceder a este menú presione los botones  y  simultáneamente. Vaya hasta ENFOQUE CERCA con el botón . Pulse el botón  para alternar entre activar y desactivar. Cuando se haya seleccionado activar, la unidad funcionará con tres niveles de enfoque (F1, F2, F3) en lugar de dos.

Congelar imagen y Guardar imagen



Si pulsa brevemente el botón  la imagen se congela. Pulse una vez más el botón  para volver a la imagen en vivo.

Una pulsación larga del botón  mientras la imagen está congelada guardará esta en la memoria interna. Al guardar la imagen, usted accederá automáticamente al modo **Recuperar imagen** que se describe a continuación.






Recuperar imagen:

Desde la imagen en vivo, una pulsación larga de  accederá al modo de recuperar imagen. La última imagen guardada aparecerá con un número de imagen, por ejemplo con el formato “# 10”. Utilice los botones  (siguiente) y  (anterior) para desplazarse a las imágenes guardadas anteriores o siguientes. Si pulsa el botón  retornará al modo de cámara en vivo.

Borrar imágenes guardadas:

Cuando esté en el modo **Recuperar imagen** (ver más arriba) podrá borrar la imagen que aparece en ese momento con una pulsación larga del botón . La unidad mostrará un icono de papelera con un “?” al lado, solicitándole que confirme si desea borrar la imagen. Otra pulsación larga de  borrará la imagen y mostrará la imagen guardada anteriormente, si existe.


Borrar todas las imágenes guardadas:

Pulse  y  simultáneamente y suéltelos para desplegar el menú. Con  desplácese hasta el campo “Borrar todas” y mantenga presionado . Se le solicitará que confirme si desea borrar todas las imágenes; vuelva a pulsar y mantener presionado  para confirmarlo, o pulse cualquier otro botón para salir.

Conexión de MagniLink Visus al PC

Las imágenes guardadas en MagniLink Visus se pueden ver en cualquier PC que tenga un USB libre. Inserte el conector micro USB del cable suministrado en la toma micro USB de la **unidad**. Conecte el otro extremo del cable a un puerto USB de su PC. Si es la primera vez que MagniLink Visus está conectado al PC, espere a que este instale automáticamente los controladores correctos. Una vez completada la instalación, aparecerá un mensaje en el PC. A continuación, MagniLink Visus aparecerá como una letra de unidad en el PC y será posible ver las imágenes.

Modo de imagen


Si pulsa varias veces el botón  (G) se desplazará entre los diferentes modos de imagen: todo color, negro en blanco y blanco en negro, y color artificial. Debe elegir el modo que le ofrece la mejor imagen para lo que está viendo. MagniLink Visus volverá a usar sus últimos ajustes de aumento, modo de imagen y enfoque la próxima vez que lo encienda.

Soporte de estabilidad


MagniLink Visus tiene en su lado inferior un soporte abatible colocado alrededor de la lente. Simplemente, tírelo totalmente hacia fuera para que le ayude a mantener la distancia ideal del objeto que está leyendo. Vuelva a abatir el soporte cuando no la use. **El soporte de estabilidad se debe usar con el enfoque ajustado en el nivel “medio”.**



Iluminación

Para facilitar la lectura de objetos retroiluminados, como teléfonos móviles o una pantalla de ordenador, se puede apagar la iluminación del aparato. Pulse y mantenga presionado el botón  durante 3 segundos para apagar las luces. Repita esto para volver a encenderlas, o simplemente apague la unidad y enciéndala otra vez.


Cambio de color artificial

Si lo desea, puede elegir entre varias combinaciones en falso color. Primero es necesario utilizar el modo de imagen en semicolor. Pulse y mantenga presionado el botón  durante 3 segundos para alternar entre las opciones disponibles, y cuando esté satisfecho con su elección suelte el botón. La nueva opción se guardará en la memoria para utilizarla con posterioridad.








Indicador de nivel de batería

Después del encendido aparecerá un indicador en la pantalla durante unos segundos indicando el nivel de carga restante en la batería. Si la batería está casi agotada, el indicador aparecerá automáticamente en la parte superior izquierda de la pantalla.

Cambio del brillo de la pantalla

Pulse y mantenga presionado el botón  durante 3 segundos y la pantalla cambiará de brillo. Existen tres ajustes: 100%, 75% y 50%. La unidad recordará el último ajuste de nivel y lo restablecerá cuando se encienda el aparato.

Ajuste del modo anti parpadeo de la cámara

Pulse  y  simultáneamente, y suéltelos para desplegar el menú. Con  desplácese hasta el campo “MODO”. Pulse  y  para seleccionar el modo anti parpadeo (50 Hz para Europa, 60 Hz para EE.UU.) o modo RÁPIDO (ajustado por defecto – permite una respuesta rápida al texto móvil en condiciones de iluminación sin parpadeos). A continuación, utilice  para acceder al campo “Guardar y salir”, y pulse  para confirmar la nueva configuración.

Desconexión automática

Después de ver durante 3 minutos una imagen que no varía, MagniLink Visus reducirá su consumo eléctrico. La pantalla se oscurecerá y la iluminación se apagará. Si advierte un movimiento, volverá a encenderse automáticamente. Si no se detecta ningún movimiento durante 8 minutos, la unidad se apagará totalmente y usted deberá pulsar un botón para encenderla otra vez.

Si la batería está agotada, MagniLink Visus se apagará y sólo volverá a encenderse después de que se cargue la batería.

Carga alternativa

MagniLink Visus puede cargarse desde el puerto USB de un ordenador o con muchos cargadores estándar para dispositivos portátiles. El conector utilizado es uno estándar de la industria y todos estos cargadores deben ser compatibles si bien los tiempos de carga pueden variar.

Instrucciones de mantenimiento y advertencias

Al limpiar la lupa MagniLink Visus no use soluciones jabonosas, solventes ni abrasivos. ¡No la sumerja en agua! Use el paño que se incluye para eliminar las huellas digitales, etc. Las manchas más difíciles pueden eliminarse con un paño húmedo.

No abra la lupa MagniLink Visus - la misma no incluye piezas que pueden ser reparadas por el usuario.

La iluminación LED en el MagniLink Visus es sumamente intensa. No mire directamente a la iluminación LED durante períodos prolongados.

Al final de su ciclo de vida, la MagniLink Visus se debe reciclar a través de una instalación de reciclado certificada. No incinerar.

Datos técnicos

	MagniLink Visus 4.3 (MLVISUS4,3)
Alimentación del cargador	100V – 240V AC 50/60Hz con el adaptador que se incluye
Tensión de alimentación de la unidad	5V DC, conector micro USB
Pantalla	Diagonal de 4,3” TFT LCD 16:9
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 45 °C
Tiempo de recarga	4 horas con el cargador suministrado
Tiempo de funcionamiento <i>Depende del modo de operación y del tema.</i>	4 horas
Peso	198 g
Aumento (cerca) (medio) (lejos)	7X, 9X y 14X 3,4X, 4,5X y 7X 1,5X, 2X y 3X

Las especificaciones son preliminares y están sujetas a modificación.

Declaración de conformidad

Nosotros, Ash Technologies Ltd., declaramos bajo nuestra responsabilidad que los productos MagniLink Visus 3.4 y MagniLink Visus 4.3 de la marca LVI (Low Vision International), al que hace referencia esta declaración, cumplen las siguientes normas y otros documentos normativos:

EN55022: 2007

EN55024: 2008

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 2008 y A1:2001 de acuerdo con EN61000-3-3:2008

Clasificación del equipo Clase B

EN62471:2008 Clasificación: Grupo de riesgo 1 - (Bajo riesgo)

de conformidad con lo dispuesto en la Directiva CEM 2004/108/CE.

Alan Johnston

Ash Technologies Ltd, Naas, Irlanda.

6 de octubre de 2011

