



Brukerhåndbok

ProVista AS

Tromøyveien 24

Telefon: +47 22 69 61 00

Epost: mail@provista.no

4841 Arendal – Norway

Faks: +47 37 05 86 87

Web: www.provista.no**LVI Low Vision International**

Verkstadsgatan 5

Tel: +46 470 – 727700

E-post: info@lvi.se

352 46 Växjö

Faks: +46 470 – 727725


Internett: www.lvi.se


Førstegangs bruk

Vi anbefaler at du lader lesekameraet MagniLink Visus helt opp før du tar det i bruk. Laderen har en rekke internasjonale strømkontakter, og du må velge den som gjelder for ditt land. Sett den på slik det er vist i illustrasjonen, og roter den til den klikker på plass.

Sett kabelen inn i laderen, og sett den inn i enden av håndtaket på MagniLink Visus (A). Ladeindikatoren ved strømkontakten vil lyse rødt når MagniLink Visus lader og slukke når den er fulladet. Det tar ca. 3 timer å lade den helt opp.

Enheten leveres med en nakkestropp som kan festes til enden av håndtaket (B) ved behov.

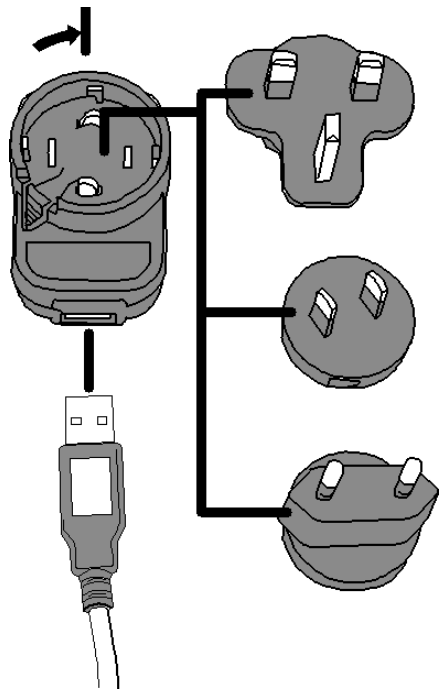

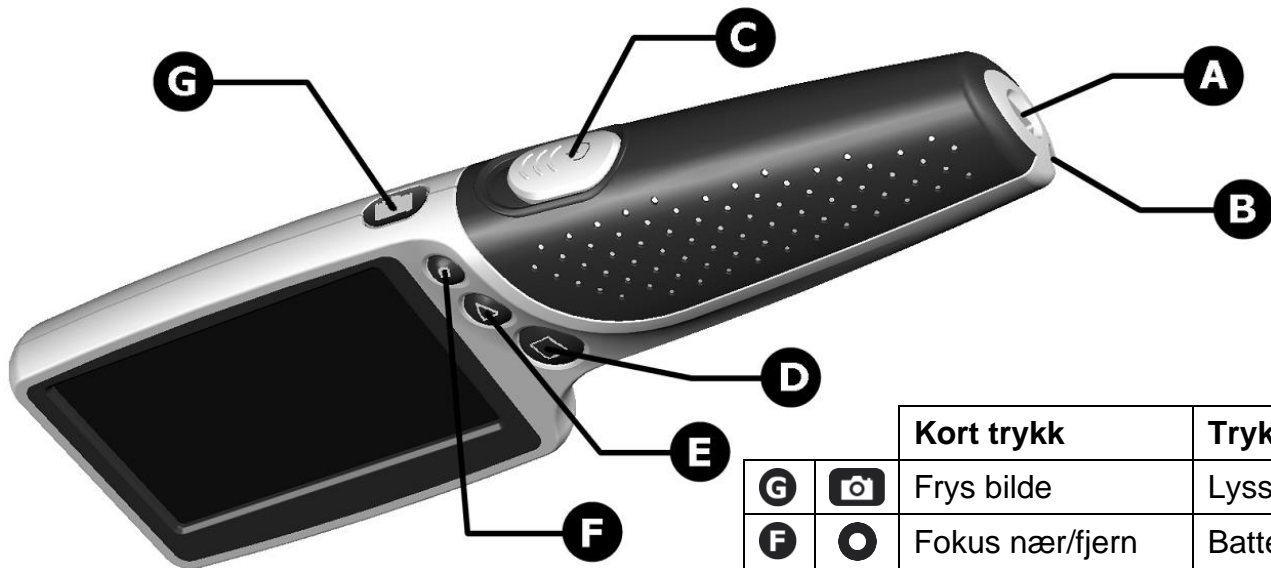


		Kort trykk	Trykk i 3 sekunder
G		Frys bilde	Lysstyrke skjerm
F		Fokus nær/fjern	Batterinivå
E		Bildemodus	Endre kunstig farge
D		Forstørrelsesnivå	Lys på/av


Slå av/på

Skyv strømbryteren (C) forover for å slå på enheten. LED-lampene på undersiden vil lyse, og det vises et bilde på skjermen. Legg enheten over det du vil forstørre med skjermen sentrert over det aktuelle området. Du må løfte eller senke enheten for å finne det skarpeste fokuset.

Forstørrelse

Du går gjennom de tre forstørrelsesnivåene ved å trykke gjentatte ganger på -knappen (D). Du kan velge nivået som best passer deg for den aktuelle tekststørrelsen.

Bildemodus

Du går gjennom de ulike bildemodiene ved å trykke gjentatte ganger på -knappen (E): fullfarge, hvitt på svart og svart på hvitt og kunstig farge. Du bør velge modusen som gir deg det beste bildet.

Neste gang du slår på MagniLink Visus, vil den bruke de samme innstillingene for forstørrelse, bildemodus og fokus.

Fokusknapp

Det kan hende du vil finne et bestemt område på en side. ●-knappen (F) øker fokusavstanden til linsen slik at du kan løfte enheten fra siden og få en større oversikt over det du vil lese. Du går tilbake til kort fokusavstand ved å trykke på ●-knappen igjen.

Støttering

MagniLink Visus har en utfellbar støttering rundt linsen på undersiden. Denne kan du enkelt vippe ut for å holde en ideell avstand til det du skal lese. Du legger den bare inn igjen etter bruk.


Frys bilde

MagniLink Visus har en funksjon som lar deg fryse bildet, noe som kan være nyttig på utgjengelige steder eller når du f.eks. skal






legge inn et telefonnummer på mobilen. Trykk på -knappen (G) for å fryse bildet; trykk en gang til for å oppheve frysefunksjonen. Det fryste bildet lagres ikke og kan ikke leses ut av enheten.


Lys

For at det skal bli lettere å lese bakgrunnsbelyste enheter slik som mobiler eller datamaskinskjermer, kan du slå av lyset på enheten. Trykk og hold -knappen inne i 3 sekunder for å slå av lyset. Du slår på lyset igjen ved å gjenta denne prosedyren eller ved å slå enheten av og på igjen.


Endre den kunstige fargen

Du kan velge mellom en rekke uekte fargekombinasjoner hvis du vil. Du må først bruke bildemodusen for kunstig farge. Trykk og hold -knappen inne i 3 sekunder til det vises en indikator midt på skjermen. Trykk på -knappen for å gå gjennom alternativene. Når du har valgt et, trykker du og holder -knappen inne i 3 sekunder igjen for å lagre.

Batterinivåindikator

Trykk og hold -knappen inne i 3 sekunder for å få opp en indikator for gjenværende batteristrøm. Hvis batteriet er nesten tomt for strøm, vil indikatoren automatisk vises midt på skjermen.

Endre skjermens lysstyrke

Trykk og hold -knappen inne i 3 sekunder for å endre skjermens lysstyrke. Det er tre innstillinger: 100%, 75% og 50%. Enheten husker det sist innstilte nivået og bruker dette neste gang den slås på igjen.

Automatisk avslåing

Hvis MagniLink Visus holdes over et uendret bilde i tre minutter, vil den automatisk redusere strømforbruket. Skjermen og lyset vil slå seg av. Når den registrerer bevegelse, slår den seg på igjen automatisk. Hvis enheten ikke registrerer bevegelse på 8 minutter, vil den slå seg helt av, og du må da trykke på en knapp for å slå den på igjen.

Hvis batteriet er tomt for strøm, vil MagniLink Visus slå seg av og være avslått helt til den lades opp igjen.

Alternativ lading

MagniLink Visus kan lades via USB-porten på en datamaskin eller via standardladere for bærbare forbrukerenheter. Kontakten som brukes, er industristandard, og alle slike ladere skal være kompatible selv om ladetidene vil variere.

Vedlikeholdsinstruksjoner og advarsler

Når du skal rengjøre MagniLink Visus, må du ikke bruke såpeløsninger, løsemidler eller slipemidler. Enheten må ikke senkes ned i vann! Bruk den medfølgende kluten til å fjerne fingeravtrykk osv. Mer gjenstridig skitt kan fjernes med en fuktet klut.

Du må ikke åpne MagniLink Visus – den inneholder ingen deler som brukeren kan utføre service på.

LED-lyset i MagniLink Visus er eksepsjonelt sterkt. Du må ikke se inn i LED-lyset i lengre perioder.

Etter endt levetid skal MagniLink Visus leveres til resirkulering på et godkjent returpunkt. Enheten må ikke brennes.

Tekniske data

	MagniLink Visus 3,4 (MLVISUS3,4)
Laderforsyning	100V – 240VAC 50/60Hz med medfølgende adapter
Enhetens matespenning	5VDC, mikro-USB-kontakt
Skjerm	3,4" diagonal AMOLED 16:9
Driftstemperatur	0 °C til 45 °C
Ladetid	3 timer med medfølgende lader
Driftstid <i>Avhengig av bruksmåte og emne.</i>	Fra 2 timer i positiv modus til over 4 timer i negativ.
Vekt	168 g
Forstørrelse (kort avstandsinnstilling) (lang avstandsinnstilling)	2,8x, 4,5x og 5,5x 1,3x, 2x og 2,5x

Spesifikasjonene er foreløpige og kan endres

Declaration of Conformity

We, Ash Technologies Ltd., declare under our sole responsibility that the products MagniLink Visus 3.4 and MagniLink Visus 4.3 of the brand LVI (Low Vision International), to which this declaration relates, are in conformity with the following standards or other normative documents:

EN55022: 2007

EN55024: 2008

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 2008 and A1:2001 to EN61000-3-3:2008

Equipment classification: Class B

EN62471:2008 Classification: Risk Group 1 – (Low Risk)

following the provisions of EMC directive 2004/108/EC.

Alan Johnston

Ash Technologies Ltd, Naas, Ireland.

6 October 2011

